

## Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

## Бандаж дородовой БД - «ТРИВЕС»

### Модель: T-1115

#### Описание:

- изготовлен из эластичной «дышащей» сетчатой ткани, не вызывающей раздражения кожи;
- имеет мягкие панели для комфортной поддержки живота;
- снабжен 2-мя пластиковыми ребрами жесткости для разгрузки поясничного отдела позвоночника;
- имеет дополнительную стяжку для оптимального размещения бандажа и надежной поддержки живота;
- комплектуется аппликатором для использования в послеродовом периоде;
- легко одевается и не сковывает движения.

#### Функции в дородовом периоде:

- обеспечивает эластичную поддержку живота;
- стабилизация положения внутренних органов и матки;
- нормальное положение плода;
- предохранение кожи живота от чрезмерного растяжения;
- снижение нагрузки на пояснично-крестцовый отдел позвоночника;
- комфорт при движении и ходьбе.

#### Функции в послеродовом периоде:

- быстрое и эффективное восстановление тонуса мышц живота;
- нормализация внутрибрюшного давления;
- уменьшение болей в области швов после операции Кесарева сечения.

#### Показания к применению:

- нормально протекающая беременность с 20-24 недели;
- многоплодие, многоводие и гипертонус матки во время беременности;
- первый месяц послеродового периода.

#### Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие;
- открытые раны, ожоги кожных покровов в области применения бандажа;
- паховые и пупочные грыжи;
- тазовое предлежание плода.

**Применять изделие по назначению и под контролем врача.**

## Бандаж послеродовой БП - «ТРИВЕС»

### Модель: T-1222

#### Описание:

- изготовлен из эластичной "дышащей" сетчатой ткани, не вызывающей раздражения кожи;
- имеет 2 пластины для разгрузки поясничного отдела позвоночника;
- снабжен дополнительной стяжкой для усиления утягивающего эффекта на переднюю брюшную стенку.

#### Функции:

- восстановление тонуса мышц живота;
- профилактика развития вентральных грыж и увеличения их размеров;
- нормализация внутрибрюшного давления;
- профилактика растяжек кожи в послеродовом периоде;
- уменьшение болей в области швов после операции Кесарева сечения.

**Показания к применению:**

- первые два и более месяцев послеродового периода.

**Противопоказания к применению:**

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- синдром портальной гипертензии;
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие.

**Применять изделие по назначению и под контролем врача.****Инструкция по применению:**

- надеть бандаж на нижнее белье, лежа на спине;
- ребра должны располагаться посередине поясничного отдела позвоночника на одинаковом расстоянии от позвоночного столба;
- зафиксировать застежку бандажа под животом до родов или на животе после родов;
- в модели T-1115 в послеродовом периоде используется аппликатор;
- отрегулировать степень фиксации с помощью дополнительной стяжки;
- длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом.

**При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

**Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

**Рекомендации по уходу:**

- перед стиркой застегните все застежки;
- рекомендована ручная стирка при температуре 30°C, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

**Состав:** полиамид - 40%, полиэстер - 25%, пенополиуретан - 20%, эластан - 15%; ребра - пластик.

T-1115

<b>Размер изделия</b>	<b>3 (S)</b>	<b>4 (M)</b>	<b>5 (L)</b>	<b>6 (XL)</b>
<b>Окружность под животом, см</b>	70-85	85-100	100-115	115-130

T-1222

<b>Размер изделия</b>	<b>2(XS)</b>	<b>3 (S)</b>	<b>4 (M)</b>	<b>5 (L)</b>	<b>6 (XL)</b>	<b>7(XXL)</b>
<b>Окружность талии, см</b>	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140