

## Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

## Корсет ортопедический КО - «ТРИВЕС»

### Модели: Т-1551, Т-1554

#### Описание:

- модель Т-1551: высота 21 см;
- модель Т-1554: высота 25 см;
- изготовлены из эластичного «дышащего» материала, не вызывающего раздражения кожи;
- эластичная двойная стяжка обеспечивает дополнительную фиксацию;
- требуемая жесткость обеспечивается 4-мя металлическими ребрами.

#### Функции:

- мягкая фиксация и стабилизация пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- разгрузка мышц спины;
- обеспечивают противоболевой эффект.

#### Показания к применению:

- боли в поясничном отделе позвоночника различной этиологии;
- остеохондроз, спондилез, спондилоартроз в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, в том числе с болевым синдромом;
- радикулит, миозит, ушибы пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- восстановительный период после травм и операций в пояснично-крестцовом отделе позвоночника;
- профилактика повреждения пояснично-крестцового отдела позвоночника при интенсивных физических нагрузках.

### Модели: Т-1552, Т-1555

#### Описание:

- модель Т-1552: высота 21 см;
- модель Т-1555: высота 25 см;
- изготовлены из эластичного «дышащего» материала, не вызывающего раздражения кожи;
- эластичная двойная стяжка обеспечивает дополнительную фиксацию;
- требуемая жесткость обеспечивается 6-ю металлическими ребрами.

#### Функции:

- полужесткая фиксация и стабилизация пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- разгрузка мышц спины и опорных сегментов позвоночника;
- обеспечивают противоболевой эффект.

#### Показания к применению:

- боли в поясничном отделе позвоночника различной этиологии;
- остеохондроз, спондилез, спондилоартроз в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, в том числе с болевым синдромом;
- радикулит, миозит, ушибы пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- восстановительный период после травм и операций в пояснично-крестцовом отделе позвоночника;
- профилактика повреждения пояснично-крестцового отдела позвоночника при интенсивных физических нагрузках;
- компенсация опорной функции при единичных межпозвонковых грыжах.

#### Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- осложненные травмы позвоночника с повреждением спинного мозга;
- необходимость индивидуального ортезирования позвоночника;
- наличие в области применения корсета контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие.

**Применять изделие по назначению и под контролем врача.**

### Инструкция по применению:

- надеть корсет на нижнее белье, лежа на спине;
- ребра жесткости должны располагаться посередине поясничного отдела позвоночника на одинаковом расстоянии от позвоночного столба;
- зафиксировать застежку корсета на животе (1);
- отрегулировать степень фиксации с помощью дополнительной стяжки (2);
- длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом.


**При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

**Если в период использования корсета появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

### Рекомендации по уходу:

- перед стиркой застегните все застежки;
- рекомендована ручная стирка при температуре 30° С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- после стирки тщательно прополоскать корсет;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

**Состав:** полиамид - 45%, эластан - 20%, пенополиуретан - 20%, полиэстер - 15%, ребра - сталь 0,5 мм.

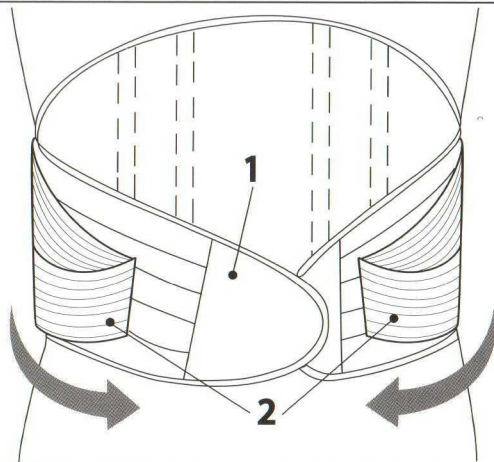

Размер изделия	2 (XS)	3 (S)	4 (M)	5 (L)	6 (XL)	7 (XXL)
Окружность талии, см	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140