



ТРИВЕС

Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, для взрослых

ТВ - «ТРИВЕС»

Модели: ТВ-003.8, ТВ-003.9, ТВ-004, ТВ-005

Описание:

- изготовлены из пенополиуретана с чехлом из хлопка, снабжены контактной лентой (застежка «Велкро»).

Функции:

- умеренная фиксация шейного отдела позвоночника и головы;
- разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи;
- нормализация кровообращения головы и шеи;
- ограничение движения в шейном отделе позвоночника.

Показания к применению:

- остеохондроз, спондилартроз в шейном отделе позвоночника;
- профилактика заболеваний шейного отдела позвоночника у людей, чья деятельность связана с длительным вынужденным статичным положением головы;
- головные боли, головокружение;
- нестабильность шейного отдела позвоночника;
- реабилитация после травм и операций на шейном отделе позвоночника;
- миозиты различной этиологии.

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- открытые раны в области использования бандажа;
- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению:

- выбрать необходимую высоту бандажа, измерив длину от ветви нижней челюсти до ключицы (см. рисунок);
- расположить бандаж на шее выемкой под подбородок;
- фиксировать контактной лентой (застежка «Велкро») сзади;
- режим и срок ношения определяются врачом.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- ручная стирка при температуре не более 30°C;
- не использовать отбеливатели, растворители и химический метод чистки;
- не отжимать, не гладить утюгом;
- держать вдали от нагревательных приборов;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света.

Состав: основа: пенополиуретан; чехол: хлопок - 100%.

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.

ОТК

АВГ 2017

