

Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения.

Бандажи противорадикулитные согревающие БПРС - «ТРИВЕС»

Модель Т-1682

Описание:

- высота бандажа 24 см;
- изготовлен из трикотажного полотна;
- на поясничной области – натуральная высококачественная овечья шерсть с высотой ворса 10 мм.

Овечья шерсть обладает следующими свойствами:

- низкая теплопроводность (поддерживает температурный баланс, привычный для человеческого тела);
- высокая гигроскопичность (поглощает влагу более 30% от собственного веса, отводит ее от тела и испаряет, выделяя тепло);
- воздухопроницаемость;
- в составе содержится ланолин - природный антисептик, обладающий антибактериальным и противоотечным действиями;
- нейтрализация положительных ионов, негативно влияющих на организм человека.

Обеспечивает:

- легкую фиксацию пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- прогрев поясницы сухим теплом.

Показания к применению:

- боли в поясничном отделе позвоночника различной этиологии;
- радикулит, миозит;
- ревматизм, остеохондроз поясничного отдела позвоночника;
- профилактика заболеваний позвоночника при физических нагрузках и переохлаждении;
- работа в прохладном помещении;
- пребывание на открытом воздухе в холодное время года.

Инструкция по применению:

- бандаж одевается на нижнее белье;
- обернуть бандаж вокруг тела и зафиксировать спереди с помощью застежки "Велкро".

Модель Т-1686

Описание:

- соткан из трикотажного полотна с использованием натуральной, высококачественной шерсти и хлопка.

Обеспечивает:

- легкую фиксацию и компрессию поясничного отдела позвоночника;
- противовоспалительный, согревающий и микромассажный эффекты.

Показания к применению:

- боли в поясничном отделе позвоночника различной этиологии;
- радикуло- и невропатии;
- миозиты в поясничной области;
- профилактика заболеваний поясничного отдела позвоночника при физических нагрузках и переохлаждении.

Инструкция по применению:

- одевать непосредственно на тело или нижнее белье;
- наденьте бандаж на поясничную область через голову или через ноги;
- равномерно расправьте бандаж;
- длительность ношения зависит от времени пребывания на холоде, определяется лечащим врачом.

При возникновении вопросов по применению обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- перед стиркой застегните все застёжки;
- рекомендована ручная стирка при температуре 30° С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не тереть и не выжимать изделие;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите бандаж и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Состав:

T-1686: полиэстер – 35%, хлопок – 28%, шерсть – 26%, эластан – 4%, полиамид – 7%;
T-1682: овечья шерсть-35%, хлопок-35%, полиамид-20%, эластан-10%, ребра: пластик.