



ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТЕЛЬКА ДЛЯ ОБУВИ С ЗАКРЫТЫМ ЗАДНИКОМ

ORTO Fit для взрослых и детей

В основе стельки тонкий пластиковый каркас, поддерживающий продольные своды и средний отдел стопы. Поверхность стельки, прилегающая к стопе, покрыта натуральной кожей. Носочная часть стельки имеет классическую форму, что соответствует наиболее частому фасону выпускаемой обуви, при необходимости может быть легко изменена в зависимости от носочной части обуви.

Назначение:

- Поддерживает продольные своды и средний отдел стопы в анатомически правильном положении.
- Амортизирует ударные нагрузки вместе со стопой за счет упругости каркаса.
- Снижает ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник.
- Уменьшает чувство дискомфорта и усталости при ходьбе.
- Улучшает комфортность обуви.

Показания:

- Профилактика утомляемости ног при ходьбе (статическая недостаточность стоп без изменения формы стопы).
- Профилактика уплощения продольных сводов при длительном пребывании на ногах, избыточном весе.
- Наличие фиксированных форм выраженной степени плоскостопия.
- Профилактика формирования Х- и О-образной формы ног,

нарушений осанки у детей.

- Сохранения эффекта достигнутой коррекции анатомических соотношений стопы в результате лечения вальгусных стоп у детей.

Противопоказания: не выявлены.

Использование: стельку ORTO Fit рекомендуется носить ежедневно в обуви с закрытым задником. Длина стельки должна соответствовать размеру обуви.

Стирка и уход: обрабатывать стельку теплой водой с помощью губки или мягкой щетки. Не сушить на нагревательных приборах и в микроволновой печи.

Состав:

Основа: полиэстер, полипропилен.

Верх: натуральная телячья кожа.

Производитель: SPANNRIT SCHUHKOMPONENTEN GMBH,
Deutschland, Industriestrasse 3, 63801 Kleinostheim
(Шпаннрит Шухкомпонентен ГМБХ, Германия,
Индустриэштрассе, 3, 63801 Кляйноштхайм)