


Арт.204С
Партия: 334043 62
L
бел
Дата изготовления
03.02.2017г.
4 620762 426489

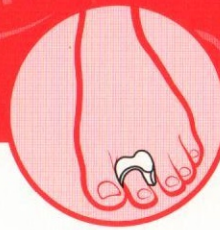

Межпальцевый РАЗДЕЛИТЕЛЬ с кольцом на палец

Показания к применению:

- может использоваться для разделения любых соседних пальцев
- нефиксированная деформация пальцев стопы
- реабилитационный период после оперативного лечения Hallux valgus
- вращение края ногтевой пластины в боковые валики на большом пальце

Действие: межпальцевая перегородка разделяет смещенные и плотно прилегающие друг к другу пальцы, предотвращает натирание и образование мозолей. При использовании между большим и вторым пальцами разгружает сустав большого пальца и косточку, защищает большой палец стопы от сдавливания и натирания, предотвращает вальгусное отклонение большого пальца и способствует его распрямлению.

Противопоказания к применению: фиксированная деформация переднего отдела стопы. Не используйте продукт при открытых ранах, местах с повреждениями или ссадинами кожи, при псориазе или экземе.

Способ применения: при использовании кольцо надевается на первый или второй палец стопы.

О наличии возможных противопоказаний проконсультируйтесь со специалистом.

Уход за изделием: промыть в слабом мыльном растворе при температуре не более 35 °С, протереть мягкой тканью, сушить вдали от нагревательных приборов.

Материал: 100% гипоаллергенный гель.

Гарантийный срок использования: 3 месяца с даты приобретения.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Хранить при нормальной температуре и влажности, вдали от солнечных лучей. Дата изготовления указана на упаковке.