

## 6. Свидетельство о приемке

Шкаф \_\_\_\_\_  
тип

\_\_\_\_\_  
зав. номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Шкаф медицинский  
ШМ 1-2**

**Паспорт**

## Паспорт изделия

Настоящий паспорт распространяется на шкафы медицинские «ШМ 1-2», предназначенные для размещения и хранения медикаментов, медицинских инструментов и прочих изделий медицинского назначения в операционных, палатах реанимации и интенсивной терапии, врачебных, процедурных, офтальмологических, стоматологических и аптечных помещениях.

### 1. Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
	ШМ 1-2
<b>1. Габаритные размеры, ± 10 мм</b>	
- ширина	435
- глубина	402
- высота	1605
<b>2. Масса, кг</b>	26,5
<b>3. Конструктивные элементы:</b>	
- двери стеклянные, шт. (общее кол-во)	1
- двери металлические, шт. (общее кол-во)	1
- полки металлические, шт. (общее кол-во)	4
<b>4. Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг</b>	10,0
<b>Примечание*</b> Допустимое отклонение от массы изделия составляет 3%	

Шкаф ШМ 1-2 - металлический одностворчатый 2х-дверный, верхняя дверь – остекленная, нижняя дверь и полки – металлические.

### 2. Комплектность

ШМ 1-2 в составе:	
Шкаф	1
Опоры регулируемые	2
Ключи	4
Ручка-кнопка	2
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт	1
Упаковка	1

### 3. Подготовка к работе

Распакуйте и осмотрите состояние шкафа после транспортировки.

Вкрутите регулируемые опоры в ножки шкафа и с их помощью отрегулируйте его устойчивость на месте установки.

Установите ручки из транспортировочного положения в рабочее.

Выполните дезинфекцию всех наружных и внутренних поверхностей химическим методом по ОСТ 42-21-2 путем протирания салфеткой, смоченной в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или в 1% растворе хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

### 4. Сроки службы и хранения

Номинальный срок службы шкафов до списания составляет 10 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления.

Шкаф в упаковке предприятия – изготовителя должен храниться на складе поставщика или потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения – 1 год.

### 5. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня их отправки потребителю.