

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: Кресло-стул с санитарным оснащением
«Ortonica» (без колес) TU 3

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи _____

Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами

Кресло-стул с санитарным оснащением

«Ortonica» (без колес) TU 3



Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации

1. Назначение

Кресло-стул с санитарным оснащением «Ortonica» (без колес) TU 3
Предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.

2. Основные технические характеристик

Ширина общая	57 см
Ширина сидения	39 см
Высота сиденья	40 см
Высота общая	63-73 см
Грузоподъемность	130 кг
Масса нетто	7 кг

2. Комплект поставки

4.1 Кресло-стул с санитарным оснащением «Ortonica» (без колес) TU 3-1 шт

4.2 Инструкция по эксплуатации - 1 шт

4. Меры безопасности

Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.

Кнопки фиксаторов на нижних частях опор должны совпадать с соответствующими отверстиями на опорах.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор.

Не допускайте контакта кресла-коляски с электрическими приборами и проводами.

При пересадке из инвалидного кресла - коляски убедитесь, что колеса стоят на тормозе.

5. Устройство

Рама кресла-стула изготовлена из стали, имеет полимерное покрытие.

Кресло-стул с санитарным оснащением может использоваться в двух вариантах: с колесами, без колес. На ножки необходимо надеть резиновые насадки, или прикрутить колеса. Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек кресла-стула. Конструкция кресла-стула позволяет устанавливать его сверху над унитазом (в этом случае ведро с крышкой убираются). Пластмассовое судно с крышкой съемное. Откидные поручни оснащены пластиковыми подлокотниками. Съемная крышка, сиденье и ведро с крышкой изготовлены из прочного пластика.

Конструкция складная, легкая, переносная.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию указанных моделей, не ухудшающих ее потребительских свойств.

7. Уход и обслуживание

7.1. Необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.

7.2. Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.

7.3. Один раз в месяц необходимо произвести:

- проверку исправности тормозных механизмов;
- проверку затяжки резьбовых соединений;

7.4. Один раз в 6 месяцев необходимо произвести: смазку подшипников.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

8.3 Срок службы 6 лет.

8.4 **Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:**

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- перемещение в коляске на спущенных колесах;
- прокол камеры в шинах колес и т. п.