

## Сведения

Средство реабилитации для инвалидов: Трость опорная TS 708, соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4718 от 15.09.2016г.

Изготовитель: « Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко.,Лтд.»  
Китай,  
Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian  
Development Zone,  
Changhongling Industrial Park ( 2<sup>nd</sup> Phase), Dali, Nanhai District,  
528234 Foshan,  
Guangdong, China

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!**

Гарантийный срок на средство реабилитации для инвалидов: Трость TS 708 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части (накладки на поручни) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Дата продажи \_\_\_\_\_

## Средство реабилитации инвалидов: Трость опорная TS 708



## Трость опорная TS 708

### 1. Назначение

1. Трость одноопорная TS 708 телескопическая с кнопочной фиксацией.

### 2. Описание

1. Настройка трости: высота рукоятки под кисть должна быть такой, чтобы локтевой сустав находился в положении сгибания под углом 10-15 градусов.
2. Правильные размеры трости важны для обеспечения эффективного и безопасного передвижения.
3. При правильном использовании трости ее следует держать в руке, противоположно пораженной конечности: рука и нога передвигаются одновременно.
4. Трость выполнена из высокопрочного алюминиевого сплава. Т-образная ручка выполнена из прочного не скользящего пластика.
5. Насадки на упоры резиновые с устройством противоскольжения.

### 3. Технические характеристики

1. Высота трости регулируется: 710-965 мм в 11 положениях.
2. Длина опорной части поручня: 130 мм.
3. Грузоподъемность: 100 кг.
4. Вес: 0,4 кг.

### 4. Комплект поставки

1. Трость TS 708 – 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

\*УПС комплектуется при заказе трости с УПС

### 5. Обслуживание и уход при эксплуатации

1. Не допускать контакта изделия с нагревательными приборами.
2. Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов.
3. Очищать влажной тканью с использованием мягких моющих средств.

Изготовитель: « Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко.,Лтд.»  
Китай,  
Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian  
Development Zone,  
Changhongling Industrial Park ( 2<sup>nd</sup> Phase), Dali, Nanhai District,  
528234 Foshan,  
Guangdong, China

### 7. Сведения о сертификации

Трости TS 708 соответствуют требованиям технической документации, ГОСТ Р 52285-2004 и признаны годными к эксплуатации.

Декларация о соответствии № РОСС RU. 0002.04ИБРО действителен с 04.07.2016г. Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4718 от 15.09.2016 Срок действия: не ограничен.

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя!