

## Сведения

Средство реабилитации для инвалидов: Трость четырехопорная ТМ 607, соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4718 от 15.09.2016г.

Изготовитель: « Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко.,Лтд.»  
Китай,  
Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian  
Development Zone,  
Changhongling Industrial Park ( 2<sup>nd</sup> Phase), Dali, Nanhai District,  
528234 Foshan,  
Guangdong, China

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!


Гарантийный срок на средство реабилитации для инвалидов: Трость ТМ 607– 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части (накладки на поручни) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Дата продажи \_\_\_\_\_

## Средство реабилитации инвалидов: Трость четырехопорная ТМ 607

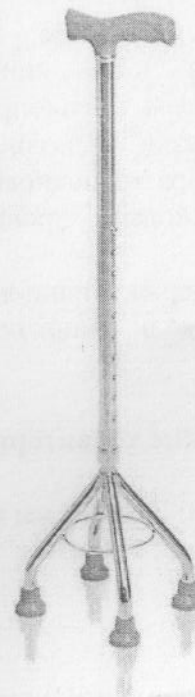

## Трость четырехопорная ТМ 607

### 1. Назначение

Трость ТМ 607 предназначена для облегчения передвижения людей с малой и средней степенью нарушения координации движений.

### 2. Описание

Трость телескопическая с кнопочной фиксацией, хромированная, выполнена из высокопрочного алюминиевого сплава. Т-образная рукоятка выполнена из прочного не скользящего пластика. Опора трапецевидная с 4-мя упорами. Насадки на упоры резиновые, прочные, не скользящие, сменные.

Трость обеспечивает поддержку пациента во время ходьбы. Может использоваться как в уличных, так и в домашних условиях.

### 3. Технические характеристики

Высота трости регулируется: 740-970 мм в 10 положениях.

Длина опорной части поручня: 130 мм.

Грузоподъемность: 100 кг.

Вес: 0,85 кг.

### 4. Комплект поставки

1. Трость ТМ 607 – 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

### 5. Обслуживание и уход при эксплуатации

1. Не допускать контакта изделия с нагревательными приборами.
2. Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов.
3. Очищать влажной тканью с использованием мягких моющих средств.

## Импортер в России:

Изготовитель: « Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко.,Лтд.»  
Китай,  
Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian  
Development Zone,  
Changhongling Industrial Park ( 2<sup>nd</sup> Phase), Dali, Nanhai District,  
528234 Foshan,  
Guangdong, China

### 7. Сведения о сертификации

Трость ТМ 607 соответствуют требованиям технической документации, ГОСТ Р 52285-2004 и признаны годными к эксплуатации.

Декларация о соответствии № РОСС RU. 0002.04ИБРО действителен с 04.07.2016г. Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4718 от 15.09.2016 Срок действия: не ограничен.

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя!