

## Сведения

Средство реабилитации для инвалидов: Ходунки XS 305, соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4717 от 08.09.2016г.

Изготовитель: « Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко.,Лтд.»  
Китай,  
Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian  
Development Zone,  
Changhongling Industrial Park ( 2<sup>nd</sup> Phase), Dali, Nanhai District,  
528234 Foshan,  
Guangdong, China

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!**

Гарантийный срок на средство реабилитации для инвалидов: ходунки XS 305 – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части (накладки на поручни) гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Дата продажи \_\_\_\_\_

## Средство реабилитации инвалидов: Ходунки XS 305



Ходунки XS 305

### 1. Назначение

Ходунки XS 305 не шагающие предназначены для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

### 2. Описание

Ходунки изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава. Опоры резиновые. Ходунки легко складываются и очень удобны при хранении.

Высота регулируется: 755-955 мм в 9 положениях.

### 3. Технические характеристики

Общая ширина: 545 мм.

Общая длина: 470 мм.

Высота в сложенном виде: 755 мм.

Ширина в сложенном виде: 545 мм.

Длина в сложенном виде: 90 мм.

Расстояние между поручнями: 440 мм.

Длина опорной части поручня: 100 мм.

Грузоподъемность: 100 кг.

Вес: 2,45 кг.

### 4. Комплект поставки

1. Ходунки XS 305 – 1шт.

2. Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1шт.

### 5. Обслуживание и уход при эксплуатации

1. Не допускать контакта изделия с нагревательными приборами.

2. Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов. Перед эксплуатацией надежно закрепить на унитаз.

3. Очищать влажной тканью с использованием мягких моющих средств.

Изготовитель: « Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко.,Лтд.»  
Китай,  
Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian  
Development Zone,  
Changhongling Industrial Park ( 2<sup>nd</sup> Phase), Dali, Nanhai District,  
528234 Foshan,  
Guangdong, China

### 7. Сведения о сертификации

Ходунки XS 305 соответствуют требованиям технической документации, ГОСТ Р 51078-97, ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 и признаны годными к эксплуатации.

Декларация о соответствии № РОСС RU. 0002.04ИБРО действителен с 04.07.2016г. Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4717 от 08.09.2016 Срок действия: не ограничен.

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя!