

## Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

## Подушка ортопедическая под голову ТОП - «ТРИВЕС»

### Модель: ТОП – 940 (FORMAL)

#### Описание:

- специальные вставки из плотного материала обеспечивают стабилизацию и поддержку шейного отдела позвоночника;
- сочетание высокоэластичных материалов разной жесткости оптимально распределяет нагрузку на шейный отдел позвоночника;
- основа подушки с «эффектом памяти» становится более эластичной от воздействия тепла человеческого тела, дарит ощущение невесомости, не препятствует воздухообмену и обеспечивает терморегуляцию;
- ребристая поверхность создает улучшенный воздухообмен и массажный эффект головы и шеи;
- система правильной поддержки головы и шейных позвонков способствует расслаблению и превосходному комфорту во время сна;
- наличие нескольких типоразмеров позволяет правильно подобрать подушку для людей разной комплекции;
- подушка снабжена внутренним хлопчатобумажным чехлом;
- в комплекте одна съемная наволочка из материала **Tencel®**:

**Tencel®** – это натуральное целлюлозное волокно, получаемое из экстракта эвкалиптового дерева. Ввиду растительного происхождения текстиля предупреждает размножение бактерий, обладает высокой воздухопроницаемостью, создает прохладу и свежесть во время сна, оказывает терморегулирующее воздействие. Отличается мягкостью шелка, свежестью хлопка и прочностью полиэстера. Tencel® создает оптимальный уровень влажности для кожи, позволяет увеличить ее защитные свойства до 50%, обеспечивает обновление клеток кожи, что в свою очередь придает ей свежий и здоровый вид.

### Модель: ТОП-950 (REST)

#### Описание:

- специальные вставки из плотного материала обеспечивают стабилизацию и поддержку шейного отдела позвоночника;
- плотный, упругий нижний слой позволяет сохранять форму подушки во время сна;
- верхний слой с «эффектом памяти» становится более эластичным от воздействия тепла человеческого тела, дарит ощущение невесомости, не препятствует воздухообмену и обеспечивает терморегуляцию;
- ребристая поверхность создает улучшенный воздухообмен и массажный эффект головы и шеи;
- уникальное трехкомпонентное сочетание для качественного сна и отдыха;
- наличие нескольких типоразмеров позволяет правильно подобрать подушку для людей разной комплекции;
- подушка снабжена внутренним хлопчатобумажным чехлом;
- в комплекте одна съемная наволочка из материала **Tencel®**:

**Tencel®** – это натуральное целлюлозное волокно, получаемое из экстракта эвкалиптового дерева. Ввиду растительного происхождения текстиля предупреждает размножение бактерий, обладает высокой воздухопроницаемостью, создает прохладу и свежесть во время сна, оказывает терморегулирующее воздействие. Отличается мягкостью шелка, свежестью хлопка и прочностью полиэстера. Tencel® создает оптимальный уровень влажности для кожи, позволяет увеличить ее защитные свойства до 50%, обеспечивает обновление клеток кожи, что в свою очередь придает ей свежий и здоровый вид.

#### Функции:

- обеспечение функционально выгодного положения во время сна на спине и на боку;
- нормализация кровообращения в вертебробазилярном бассейне;
- разгрузка суставов и связочного аппарата шейного отдела позвоночника;
- нормализация мышечного тонуса шеи и плечевого пояса;
- стабилизация шейного отдела позвоночника.

### Показания к применению:

- болевой синдром в шейном отделе позвоночника различного генеза;
- дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела позвоночника;
- нарушения кровообращения в вертебробазилярном бассейне;
- миофасциальный болевой синдром;
- выраженный остеохондроз шеи (модель **ТОП-940**);
- модель **ТОП-950** наиболее подходит для людей с выраженными проявлениями дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника и реабилитации после травм;
- профилактика обострений заболеваний позвоночника во время сна.

### Противопоказания к применению:

Абсолютных и относительных противопоказаний к применению не выявлено.

**Применять изделие по назначению и под контролем врача.**

### Рекомендации по уходу:

- основа в чехле: сухая чистка;
- не использовать химический метод чистки;
- съемная наволочка: стирать в теплой воде до 40°C мягкими моющими средствами, не отбеливать, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- держать вдали от нагревательных приборов;
- не класть на изделие давящие и колюще-режущие предметы.

### Состав:

- основа: пенополиуретан;
- чехол: хлопок – 100%;
- съемная наволочка из материала Tencel®: полиэстер - 76,3%, Tencel - 23,7%.

Размер изделия	S	M	M+	L	XL
Высота валиков, см	9/7	11/9	12/10	13/11	15/13
Ширина, см	50	50	50	56	56
Глубина, см	30	33	33	37	38

**Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.**

Приспособления ортопедические специальной формы для расслабления мышц и разгрузки позвоночника ТОП-«ТРИВЕС» по ТУ 9396-002-85557773-2008 в следующих исполнениях: Подушка ортопедическая под голову ТОП-«ТРИВЕС» (вид 181450), РУ № ФСР 2008/03750 от 30.09.2016 г.

#### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи, срок хранения 5 лет.



ISO 13485-2003



Дата выпуска **ДЕК 2017**  
Штамп ОТК

Дата продажи **ОТК**  
Штамп торг. организации