


**Хранение и уход:** укладку в процессе эксплуатации и хранения следует содержать чистой и сухой. По мере загрязнения обработка и дезинфекция укладки УМСП-01-Пм производится по МУ287-113 методом протирания салфеткой, смоченной хлорамином по ТУ 6-01-4689387-16. Наружные и внутренние поверхности в процессе очистки от белковых, жировых, механических загрязнений, а также лекарственных средств устойчивы к воздействию моющего раствора: 0,5 %-ной перекиси водорода по ГОСТ 177 и 0,5 %-ого синтетического моющего средства типа "Лотос", "Астра" по ГОСТ 25644.

**Гарантии изготовителя:** Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев со дня продажи. При необходимости сервисного обслуживания укладки, получения опций и запасных частей обращайтесь к изготовителю по адресу и телефонам, указанным на титульном листе настоящего руководства, а также на этикетке, наклеенной на укладку.

**Замена тяги укладки с использованием ремонтного комплекта:**

Состав ремкомплекта:

- замок – 1 шт.;
- тяга – 2 шт.;
- втулка – 2 шт.;
- шайба пружинная («гровер») 4x1 – 2 шт.;
- винт М4х18 – 2 шт.;
- гайка М4 – 2 шт.

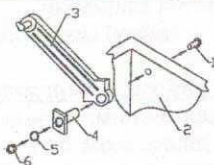

- обозначения на рисунке:
- 1 – винт;
  - 2 – корпус укладки, внутренняя сторона
  - 3 – тяга
  - 4 – втулка
  - 5 – пружинная шайба
  - 6 – гайка

**Свидетельство о приёме:** укладка врача скорой помощи

Наименование	Артикул
УМСП-01-Пм	321
УМСП-01-Пм/2	839

соответствует ТУ 9437-006-52777873-2010 и признана годной для эксплуатации.

№ партии: 2470839

Дата выпуска: 14.11.2017г.

Дата продажи:



Подпись продавца:

Укладка врача скорой помощи серии УМСП-01-Пм – надёжное средство комплектования, хранения и транспортировки медицинского имущества. Благодарим Вас за Ваш выбор и надеемся, что работать с ним Вам будет легко и удобно.

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу укладки – это поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.




ОКП 943790  
 ТУ 9437-006-52777873-2010  
 Рег. уд. № ФСР 2010/07335 от 07.07.2015г

**УКЛАДКА ВРАЧА СКОРОЙ ПОМОЩИ  
 СЕРИИ УМСП-01-Пм**

**Руководство по эксплуатации  
 ЛКЯМ.323366.001 РЭ**

*Перед началом работы с изделием  
 внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

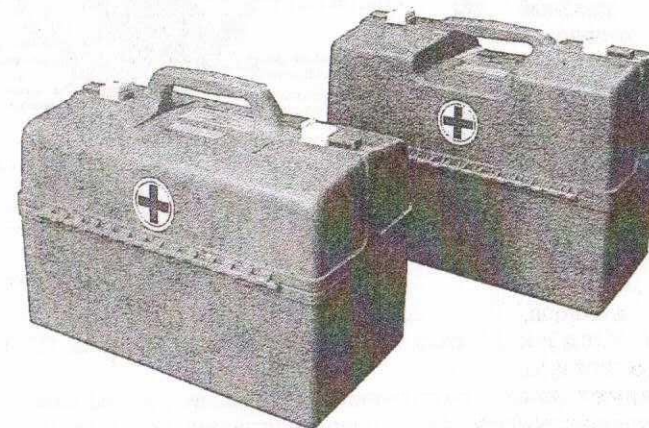

Сделано в России

**Назначение:** укладка врача скорой помощи серии УМСП-01-Пм предназначена для комплектования, хранения и транспортировки медицинских изделий.

**Область применения:** службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины; спецтранспорта пожарных и ГАИ; медпункты, здравпункты предприятий, амбулаторные учреждения.

**Технические характеристики:**

серия	УМСП-01-Пм	УМСП-01-Пм/2
параметр	(со стандартными створками)	(с увеличенными створками)
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	440x252x330	440x252x340
Масса без вложений, кг,	2,5	2,5
Количество мест для ампул	176	202

Рабочий диапазон температур: от -30 °С до +40 °С

Номинальная нагрузка: не более 10 кг.

**Комплект поставки:**

1. Футляр-укладка с внутренними элементами.
2. Лист липкой аппликации с названиями лекарственных средств.
3. Ремонтный комплект.
4. Руководство по эксплуатации.

**Описание изделия:**


Укладка врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-Пм представляет собой удобный легкий чехол из холодо- и теплостойкого ударопрочного пищевого пластика АБС с двумя раскрывающимися в стороны створками. Укладки имеют основной отсек для размещения вложений (бинтов, шприцов, инструментов и т.д.) и 2 лотка с ложементами из изолона ППЭ для ампул и флаконов-антисептиков.

В комплект входит лист липкой аппликации с названиями лекарственных средств. Названия приклеиваются непосредственно на ложементы для большей наглядности при работе с укладкой.

**Варианты исполнения упаковок:**

**Укладка УМСП-01-Пм (440x252x330)** имеет ложемент для ампул 1 и 2 мл – 115 мест, ложемент для ампул 5 мл – 25 мест и ложемент для флаконов антисептиков на 7 мест. Ложементы для ампул на 10 и 20 мл (36 мест) расположены на дне футляра и защищены перегородками (перегородка на дно футляра высотой 9 см и перегородка на дно футляра высотой 14,5 см).

**Укладка УМСП-01-Пм/2 (440x252x340)** имеет ложемент для ампул 1,2 и 5 мл – 148 места, ложемент для ампул 10 мл и 20 мл – 54 места и 6 мест для флаконов антисептиков.

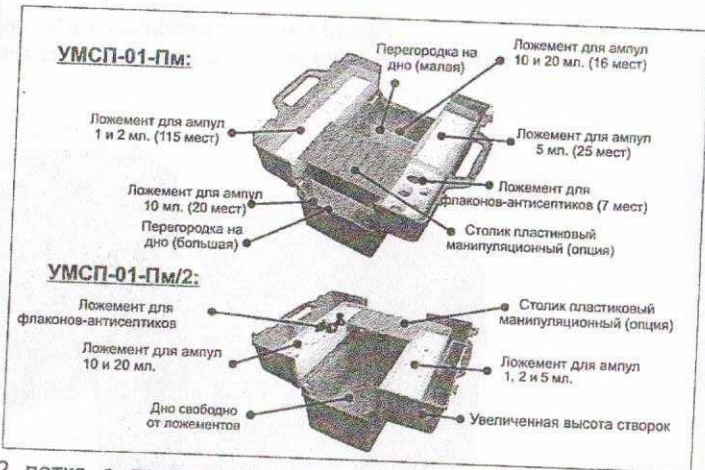

**Опции:** С помощью опций конструкция укладки может быть адаптирована под индивидуальные требования. Например, укладка может быть использована для хранения и транспортировки инфузионных флаконов (инфузионный набор).

- **столлик манипуляционный.** Для установки столика в рабочее положение необходимо полностью раскрыть укладку, развести створки в стороны, разместить столлик между лотками, зацепив его за края правого и левого лотка.

- **ампульница из ткани ПВХ.** Если потребителю нужно использовать лотки укладки для хранения, ампулы можно разместить в тканевой ампульнице.

- **дополнительные перегородки на дно и в лотки.** Используются для разделения вложений на функциональные блоки (например, эпидукладка, таблетки)

- **вкладыши в укладку для размещения вложений.** Предназначены для раздельного размещения медицинского имущества.

- **держатели инфузионных флаконов с кронштейнами-крючками.** Предназначены для подвешивания стеклянных флаконов на 200 мл и 400 мл за элементы интерьера. Держатели выполнены в виде расстегивающейся сетки из ранцевой ленты. Пластиковые флаконы подвешиваются непосредственно на кронштейн-крючок. Пара таких держателей не занимает много места в укладке. Держатели вместе с катетерами и инфузионными системами можно поместить в отдельный вкладыш в укладку, получится компактный инфузионный комплект, который можно поместить в любую укладку или набор.

- **ремень плечевой.** Предназначен для переноса укладки серии УМСП-01-Пм, обеспечивает равномерное распределение веса укладки. Ремень регулируется по длине и оборудован накладкой против сминания.

*Опции можно заказать вместе с укладкой или отдельно.*

**Подготовка к работе и правила работы с укладкой:**

1. Перед началом работы с набором внимательно прочтите данное руководство.
2. Замки укладки открываются движением от ручки и снимаются для обработки движением к ручке при открытых створках. При закрывании не допускайте перекоса створок.
3. Для очистки внутренней поверхности лотков и створок лотки укладки сделаны съёмными. Чтобы установить лоток на место, надо слегка отогнуть угол створки и совместить шип на торце лотка с фиксирующим кольцом на внутренней поверхности створки – поочерёдно с двух сторон.
4. Резьбовые соединения тяг защищены от вибрации пружинными шайбами. Однако, при интенсивной эксплуатации укладки периодически проверяйте состояние винтов, при необходимости закрутите их отвёрткой.
5. При необходимости увеличить объём отсека для антисептиков в лотке ложемент можно извлечь.
6. Не рекомендуется ставить укладку в салоне санитарного автомобиля возле отопителя. Пластик термостоек, однако следует избегать перегрева ампул.
7. Укладка защищает содержимое от повреждений. Однако при транспортировке и работе с ней избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке медицинских инструментов и нарушению стерильности вложений. При хранении и транспортировке укладка должна быть всё время ориентирована вертикально (ручкой вверх). Не нагружайте укладку более чем на 10 кг, в противном случае это может привести к её поломке. Бережное отношение и аккуратная работа с укладкой продлевает срок ее службы.