

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: насадка на унитаз Ortonica TU 144/110

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты и изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи _____

Насадка на унитаз Ortonica TU 144/ TU 110

Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации



Специальное оборудование для туалетных
комнат

1. Назначение

Насадка на унитаз Ortonica TU 144/110 является специальным оборудованием для туалетных комнат. Изделие предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как санитарно-гигиеническое приспособление для увеличения высоты унитаза.

2. Описание

Насадка на унитаз Ortonica TU 144/110 выполнена из полимерного материала. Она подходит на унитаз любой формы, и устанавливается с помощью крепежей, входящих в комплект. Может устанавливаться как на унитаз, так и вовнутрь. Поставляется в комплекте с крышкой, или без нее. Высота изделия определяется индивидуальным заказом, в соответствии с требованием пациента/пользователя.

3. Технические характеристики

Насадка на унитаз Ortonica TU 144/120	Высота см"	Ширина сиденья см	Глубина сиденья см	Общая длина см	Общая ширина см	Масса нетто кг	Максимальная нагрузка кг
С крышкой	15/6"	36	40	40	36	1,35	100
С крышкой	10/4"	36	40	40	36	1,15	100
Без крышки (полиуретан)	5/2"	39	45	45	39	1,00	100
Регулируемое	21/8"	39	45	40,5	38,5	1,4	100

4. Комплект поставки

1. Насадка на унитаз – 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

5. Обслуживание и уход при эксплуатации

1. Не допускать контакта изделия с нагревательными приборами.

2. Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов. Перед эксплуатацией надежно закрепить на унитаз.
3. Очищать влажной тканью с использованием мягких моющих средств.

6. Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-туалетов требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51632-2000, стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993-99), при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год. Срок хранения- 3 года.

Изготовитель: ZhenJiang Assure Medical Equipment Co., Ltd, «Джеджанг Ашуре Медикал Эквипмент Ко.», (Лтд), Китай,
ZhenJiang Assure Medical Equipment Co.,Ltd., №3 factory, Xingdingmao Industry Park, Dingmao Development Zone, ZhenJiang city, Jiangsu Province, China.

7. Сведения о сертификации

Насадка на унитаз Ortonica TU 144 соответствуют требованиям технической документации, ТУ 9451-001-54627445-2006 и признан годными к эксплуатации. Декларация о соответствии № РОСС CN.AГ98.Д34486 действителен с 28.07.2014 г. по 27.07.2017г. Регистрационное удостоверение ФСЗ №2012/13491 действительно с 27.12.2012 г. Срок действия: не ограничен.

МП

Дата выпуска