

+

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАНЖЕТЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, тип H, D, P, S, B

МОДИФИКАЦИИ:

- Манжета № 1 "CS Medica" index "H" - для новорожденных с длиной окружности плеча 9-14 см
 - Манжета № 2 "CS Medica" index "D" - для детей с длиной окружности плеча 13-22 см
 - Манжета № 3 "CS Medica" index "P" - для подростков с длиной окружности плеча 18-27 см
 - Манжета № 4 "CS Medica" index "S" - взрослый размер, для людей с длиной окружности плеча 24-42 см
 - Манжета № 5 "CS Medica" index "B" - большой взрослый размер, для людей с длиной окружности плеча 34-50 см
- Наличие манжет для рук с различной длиной окружности плеча даёт возможность измерять артериальное давление приборами моделей "CS Medica" у всех возрастных категорий пользователей.



ВНИМАНИЕ: Размер манжеты должен обязательно соответствовать длине окружности плеча каждого конкретного пользователя. Несоответствие размера манжеты с длиной окружности плеча отрицательно сказывается на точности измерения артериального давления.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МАНЖЕТОЙ

- 1) Вставьте в одну из двух отводящих воздушных трубок манометр, во вторую трубку - нагнетательную грушу.
 - 2) Наложите манжету на левое или правое плечо таким образом, чтобы место соединения манжеты с воздушной трубкой находилось на внутренней стороне руки (вдоль артерии).
 - 3) Оберните манжету вокруг плеча так, чтобы место соединения манжеты с воздушной трубкой находилось на 1-2 см выше локтевого сгиба.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Следите за тем, чтобы между манжетой и рукой не было пространства. Для ликвидации этого пространства наложите манжету немного на конус.
- 4) Манжета должна повторять форму Вашей руки.
 - 5) Положите руку на стол ладонью вверх так, чтобы манжета была на уровне сердца. При необходимости подложите под руку подушечку или свернутое полотенце. Расслабьтесь и слегка сожмите ладонь.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Пятна на манжете удаляйте аккуратно, используя ткань, смоченную в водно-мыльном растворе. Стирать манжету запрещается.
- Для защиты манжеты от пыли и сырости храните её в специальном чехле.
- Не допускайте сгибов, переломов и растяжений резинового шланга и манжеты.
- Не производите самостоятельно ремонт манжеты. В случае обнаружения дефекта обращайтесь в гарантийную мастерскую.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение всего срока службы. При правильной эксплуатации срок службы манжеты составит не менее 1 года или 2 тыс. измерений, в зависимости от того, какая из единиц измерения будет достигнута (наступит) раньше.

Срок гарантии: 1 год

Модель _____ Дата продажи _____

Штамп магазина _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя _____

Дата обращения _____ Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю _____

Подпись _____ Работу принял _____
или штамп мастера (подпись клиента)

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04558 от 07.10.2010 г., срок действия не ограничен.

- СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РОССТАНДАРТ РОССИИ

Декларация о соответствии № РОСС CN.AG75.Д42231 от 10.10.2013 г., срок действия до 09.10.2018 г. Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 50444-92 (р.3,4), ГОСТ Р 51959.1-2002



Сисз МЕДИКА