

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

ВиЦыАн


Разработка и производство изделий
медицинского назначения

Валики «ВиЦыАн»

Паспорт-инструкция

Полувалик многофункциональный (р. 500*75мм)

Артикул ВиЦыАн-ПВалМФ01

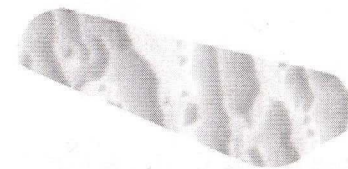

Назначение изделия

Для фиксации и поддержки в заданном положении необходимых частей тела.

Ограничения и противопоказания к применению

Аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено изделие или чехол, острые воспалительные заболевания кожи в области применения полувалика.

Технические характеристики

Полувалик изготовлен из пенополиуретана марки ST 25/36. Влагонепроницаемый съемный чехол изготовлен из синтетической ткани (полиэстер 100%) плотностью 210г/м² с влагонепроницаемым полиуретановым покрытием. На чехле вшита молния. Полувалик упакован в полиэтиленовый мешок.

Габаритные размеры, мм

Длина - 500
Ширина - 150
Высота - 75

Характеристики для транспортировки

Объем, м.куб. - 0,006
Вес, кг - 0,200
Количество мест: 1

Комплектация

В комплект входит полувалик - 1шт
Чехол съемный - 1шт
Упаковка - 1шт
Паспорт-инструкция - 1 шт

Сертификат соответствия №РОСС RU.МЕ04.НО1566 от 04.04.2016г.
ТУ 9218-002-97965187-2013.

Дата изготовления

25 декабря 2017 г.

Способ утилизации

Изделие утилизируется вместе с бытовым мусором.

Правила использования

Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовый мешок. При первичном использовании изделия возможен период привыкания к изделию, но не более 2-х недель.

При температуре воздуха ниже 1°С возможно уплотнение пенополиуретана, поэтому не рекомендуется использовать подушку при данной температуре более 1 часа. Свойства пенополиуретана восстанавливаются после нагревания подушки до комнатной температуры.

Изделие требует своевременной (в зависимости от загрязнения) стирки, дезинфекции и сушки

Эксплуатировать изделие в сухих помещениях при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности 85% (при +25°С).

Правила ухода за изделием

Чистку изделия нужно осуществлять только с использованием специальных щадящих чистящих средств, не содержащих хлора и органических растворителей.

Способ дезинфекции – двукратное протирание дезинфицирующими средствами с интервалом в 15 минут.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Условия транспортировки

Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах.

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил эксплуатации и ухода. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.