

БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (ТУТОР)

SKN 401

Тутор на коленный сустав, разъемный, трехпанельный. Снабжен металлическими вставками, в собранном виде расположенными по задней и боковым поверхностям ортеза, шестью фиксирующими параллельными, встречно расположенными ремнями, съёмным валиком для подколенной ямки.

Назначение: жесткая наружная фиксация коленного сустава в положении разгибания, исключающая возможность движений в коленном суставе.

Показания к применению:

- неосложненные переломы большеберцовой кости;
- повреждение внутрисуставного хряща и менисков коленного сустава;
- кровоизлияние в полость сустава;
- период ранней реабилитации после гипсовой иммобилизации при переломах большеберцовой и бедренной костей;
- травмы капсулы и связочного аппарата коленного сустава различной степени тяжести;
- несостоятельность связок коленного сустава;
- профилактика патологической установки нижней конечности при умеренном вальгусном или варусном отклонении голени;
- профилактика развития сгибательной контрактуры коленного сустава;
- обострения артрозоартрита коленного сустава;
- использование в качестве шины при транспортной иммобилизации или лангеты при наличии аллергии на гипс.

Противопоказания. Относительные: локальные дерматиты; открытые повреждения кожных покровов.

Абсолютные: гемофилитический гемартроз при сохраненной подвижности в коленном суставе; лимфовенозная недостаточность II-III степени.

Длительность применения: без ограничений согласно рекомендациям лечащего врача.

Использование: расстегнув предварительно застёжки, разъединить боковые панели. Надевать непосредственно на голое тело или хлопчатобумажный чулок. Расположить основную панель по задней поверхности бедра таким образом, чтобы валик находился в подколенной ямке. Затем поочередно примерить боковые панели так, чтобы в образовавшемся отверстии находилась коленная чашечка, после чего зафиксировать их на основной панели с помощью застёжки «велкро» («липучка»). Окончательная фиксация тьютора осуществляется шестью параллельными ремнями, продетыми через пряжку.

Внимание! Избегать контакта застёжки «велкро» (крючок) с внутренней поверхностью изделия для предотвращения образования затяжек.

Стирка и уход: перед стиркой разъединить панели, закрыть липучую застёжку, вынуть металлические вставки. Стирать изделие необходимо в развернутом виде, вручную, в теплой воде ($t = 40^{\circ}\text{C}$) с использованием мягких моющих средств, не содержащих хлора. Не выкручивать. Сушить в разложенном виде, без использования нагревательных приборов.

Состав: полиуретан, полиэтилен, полиэстер, нейлон.