



Спринцовка пластизольная поливинилхлоридная СПП - «Альфа» для медицинских процедур тип Б № 6 с двумя наконечниками



ISO 9001: 2008

ТУ 9398-033-00149535-2006 РУ № ФСР 2011 /12235 от 09.02.2016г.

Инструкция по эксплуатации

1. Назначение

Спринцовка предназначена для медицинских целей, в том числе для ирригации (орошения) и отсоса жидкости из послеоперационной полости, в лечебных учреждениях и для индивидуального пользования.

2. Эксплуатация

Перед применением спринцовку дезинфицируют кипячением в воде (30+5) минут. Наконечник стерилизуют при полном погружении в 3 % (по массе) раствор перекиси водорода на 80 минут, затем промывают в чистой проточной воде. Перед применением спринцовки наконечник смазывают нейтральным жиром (вазелином, ланолином). После каждого использования спринцовки наконечник и баллон промывают горячей водой с мылом, ополаскивают чистой проточной водой и просушивают.

Спринцовка не рекомендована к применению масел. Спринцовка стойка к действию водно-спиртовых растворов.

3. Хранение

Спринцовку следует хранить в помещении при температуре от 0 до плюс 25° С и относительной влажности воздуха не выше 80 % на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. Спринцовка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, растворителей, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих изделие.

Срок годности спринцовки - 2 года со дня изготовления.

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие спринцовок требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

Гарантийный срок годности спринцовок - 1 год со дня изготовления.

5. Утилизация

Утилизация спринцовок после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113.