

Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

Подушка ортопедическая под голову ТОП - «ТРИВЕС»

Модель: ТОП - 900 (UNO)

Описание:

- материал основы с «эффектом памяти» с открытыми ячейками становится более эластичным от воздействия тепла человеческого тела, дарит ощущение невесомости, не препятствует воздухообмену и обеспечивает терморегуляцию;
- ребристая поверхность по всей поверхности подушки обеспечивает массажный эффект, наибольшее погружение головы и шеи, разгрузку мышц и костно-связочных структур позвоночника;
- обладает легким тракционным воздействием на шейный отдел позвоночника;
- способствует ускоренному восстановлению организма во время сна;
- наличие двух типов – средней жесткости (**mid**) и жесткой (**hard**) – и нескольких типоразмеров позволяет правильно подобрать подушку для людей разной комплекции;
- подушка снабжена внутренним хлопчатобумажным чехлом и съемной наволочкой.

Модель: ТОП-920 (DUO)

Описание:

- двухкомпонентное сочетание упругого основания и реагирующего на тепло человека верхнего слоя обеспечивает максимальную разгрузку шейного отдела позвоночника;
- плотный, упругий нижний слой позволяет сохранять форму подушки во время сна;
- материал верхнего слоя с «эффектом памяти» дарит ощущение невесомости, не препятствует воздухообмену и обеспечивает терморегуляцию;
- ребристая поверхность по всей поверхности подушки обеспечивает массажный эффект;
- можно использовать при дорсопатиях и реабилитации после травм шеи;
- обладает выраженным терапевтическим эффектом;
- уникальное сочетание комфорта и поддержки шейного отдела позвоночника;
- наличие нескольких типоразмеров позволяет правильно подобрать подушку для людей разной комплекции;
- подушка снабжена внутренним хлопчатобумажным чехлом и съемной наволочкой.

Модель: ТОП-930 (TRIO)

Описание:

- трехслойное уникальное сочетание материалов;
- базовый упругий слой сохраняет форму подушки во время сна, фиксирует валики в необходимом положении;
- средний высокоэластичный слой максимально разгружает шейный отдел и плечевой пояс;
- верхний слой с «эффектом памяти» и валиками различной высоты обеспечивает правильное положение головы и шеи, дарит ощущение невесомости, не препятствует воздухообмену;
- максимальная разгрузка шейного отдела, нормализация кровообращения мозга, стабилизация шейного отдела позвоночника в функционально выгодном положении, вследствие чего минимизируются бессонница и головные боли;
- наличие нескольких типоразмеров позволяет правильно подобрать подушку для людей разной комплекции;
- подушка снабжена внутренним хлопчатобумажным чехлом и съемной наволочкой.

Функции:

- обеспечение функционально выгодного положения во время сна на спине и на боку;
- нормализация кровообращения в вертебробазиллярном бассейне;
- разгрузка суставов и связочного аппарата шейного отдела позвоночника;
- нормализация мышечного тонуса шеи и плечевого пояса;
- стабилизация шейного отдела позвоночника (модели **ТОП-920, ТОП-930**).

Показания к применению:

- болевой синдром в шейном отделе позвоночника различного генеза;
- дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела позвоночника;
- нарушения кровообращения в вертебробазилярном бассейне;
- миофасциальный болевой синдром;
- профилактика обострений заболеваний позвоночника во время сна;
- реабилитация после травм шеи, в том числе хлыстовой (модели **ТОП-920**, **ТОП-930**);
- реабилитация после травм и лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (модели **ТОП-920**, **ТОП-930**).

Противопоказания к применению:

Абсолютных и относительных противопоказаний к применению не выявлено.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Рекомендации по уходу:

- основа в чехле: сухая чистка;
- не использовать химический метод чистки;
- съемная наволочка: стирать в теплой воде до 40°C мягкими моющими средствами, не использовать отбеливатели и растворители;
- отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- держать вдали от нагревательных приборов;
- не класть на изделие давящие и колюще-режущие предметы.

Состав:

- основа: пенополиуретан;
- чехол: хлопок – 100%;
- съемная наволочка: полиэстер - 67,8%, Thermocool - 32,2%.

<i>Размер изделия</i>	<i>S</i>	<i>M</i>	<i>M+</i>	<i>L</i>	<i>XL</i>
<i>Высота валиков, см</i>	9/7	11/9	12/10	13/11	15/13
<i>Ширина, см</i>	50	50	50	56	56
<i>Глубина, см</i>	30	33	33	37	38

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.