

Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

Бандаж фиксирующий, поддерживающий для руки после травм БПРТ – «ТРИВЕС»

Модель: Т – 8191 (косынка детская)

Описание:

- изготовлен из плотного сетчатого материала с высокой влаго- и воздухопроницаемостью;
- мягкая накладка препятствует натиранию шеи при длительном использовании;
- ремень вокруг талии обеспечивает фиксацию верхней конечности при ходьбе и движении;
- петля для большого пальца дополнительно разгружает кисть и лучезапястный сустав;
- подходит для детей, для левой и правой руки.

Функции:

- фиксация верхней конечности в функционально выгодном положении;
- разгрузка мышечно-связочного аппарата и суставов верхней конечности.

Показания к применению:

- иммобилизация плечевого сустава и верхней конечности после операций и гипсовых повязок;
- частичные повреждения сумочно-связочного аппарата ключично-акромиального сочленения, плечевого и локтевого суставов, подвывихи плеча, ушибы верхней конечности;
- артрозы, артриты суставов верхней конечности, плечелопаточный периартрит;
- парезы и параличи верхней конечности;
- вывихи, в том числе привычные вывихи плечевой кости;
- реабилитация после переломов лопатки.

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования сустава;
- злокачественные новообразования в области использования бандажа;
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Условия применения изделия:

Бандаж Т-8191 (косынка детская) можно носить в течение всего дня.

В зависимости от патологии сроки и режимы ношения определяются врачом.

Инструкция к применению:

Расположить предплечье в муфте бандажа. С помощью наплечного ремня отрегулировать угол сгибания конечности в локтевом суставе. Угол сгибания должен быть 90°, либо определяется врачом. Закрепить бандаж на туловище с помощью поясного ремня. Большой палец поместить в петлю для предотвращения проскользывания изделия и разгрузки лучезапястного сустава

Режим и сроки ношения определяются лечащим врачом или специалистом.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу. Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Уход за изделием и хранение:

- перед стиркой необходимо застегнуть все застёжки «Велкро»;
- изделие можно стирать по мере загрязнения вручную, в теплом мыльном растворе (при температуре не выше 40 градусов по Цельсию);
- не применять машинную стирку;
- не стирать совместно с другим бельем или изделиями (особенно имеющими ворсистую структуру или подверженными возникновению зацепок);
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- не рекомендуется выкручивать или сильно отжимать изделие;
- сушить в расправленном виде на открытом воздухе вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства распространяются при условии соблюдения правил хранения, использования и ухода за изделием.

Состав: полиэстер - 85%, полиамид - 15%.

Размер изделия	0 (XXXS)	1 (XXS)	2 (XS)
Длина предплечья, см*	21-24	24-27	27-30

*Измерение снимается сантиметровой лентой от вершины локтевого отростка до средней фаланги пятого пальца кисти.