

## Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

## Бандаж компрессионный на коленный сустав БККС - «ТРИВЕС»

### Модель: Т-8592 (полуразъемный)

#### Описание:

- основа компрессионного бандажа выполнена из материала FORTIS El-Tex, с высокой эластичностью и компрессией. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью и антибактериальным эффектом;
- подколенная вставка из трикотажного материала предотвращает натирание чувствительной кожи и обеспечивает высокую воздухопроницаемость;
- парные металлические пружинные ребра жесткости по боковым поверхностям изделия (4 шт.) – для усиления фиксирующего эффекта;
- силиконовая лента по внутреннему верхнему краю бандажа предотвращает сползание изделия и его проворачивание на ноге;
- разъемная верхняя часть позволяет использовать бандаж при увеличенной окружности нижней трети бедра;
- дополнительные ленты с застежками «Велкро» по верхнему и нижнему краям бандажа предназначены для лучшей фиксации изделия в области коленного сустава;
- дополнительное кольцо фиксирует надколенник.

#### Функции:

- обеспечивает возможность применения бандажа при нестандартных анатомических пропорциях бедра и голени;
- эффективно снимает отечность коленного сустава и нижней трети бедра;
- обеспечивает среднюю степень фиксации коленного сустава;
- уменьшает объем движений в пораженном коленном суставе;
- предотвращает патологические движения в коленном суставе;
- стабилизирует положение коленной чашечки;
- защищает колено и надколенник от ударных нагрузок;
- уменьшает болевые ощущения в области коленного сустава, в нижней трети бедра и верхней трети голени;
- улучшает кровоснабжение в области коленного сустава, в нижней трети бедра и верхней трети голени;
- ускоряет реабилитацию после травм и заболеваний коленного сустава;
- предупреждает развитие обострений хронических заболеваний в области коленного сустава;
- предотвращает травмы коленного сустава при занятиях спортом и активном образе жизни.

#### Показания к применению:

- отеки в области колена при артрозах, артритах, синовитах, бурситах;
- посттравматические отеки нижней трети бедра и коленного сустава;
- необходимость фиксации коленного сустава;
- ушибы в области коленного сустава;
- растяжения связок коленного сустава;
- боли в коленном суставе при движении и в покое;
- легкая нестабильность коленного сустава;
- нестабильность надколенника;
- реабилитация после травм коленного сустава на средних и поздних сроках;
- реабилитация после операций на коленном суставе (в том числе эндоскопических);
- профилактика спортивных травм при занятиях активными видами спорта;
- профилактика обострений хронических воспалительных заболеваний в области коленного сустава (артриты, бурситы, синовиты, артрозы).

#### Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования сустава;
- злокачественные новообразования в области использования бандажа;
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие;
- тромбоз вен в области использования бандажа.

## Применение изделия по назначению и под контролем врача.

### Условия применения изделия:

Конструкция изделия и применяемые в изделии разновидности материалов FORTIS позволяют носить бандаж Т-8592 (полуразъемный) при любой температуре внешней среды.

При лечении заболеваний коленного сустава, нижней трети бедра и верхней трети голени ношение рекомендуется ограничить до 10 часов подряд. При наличии показаний можно использовать изделие во время ночного сна и дневного отдыха в положении лежа.

При длительном (более 6 часов подряд) ношении компрессионного бандажа Т-8592 через каждые 3-4 часа необходимо делать перерыв в его использовании на 20-30 минут, полностью сняв изделие или опустив его до середины голени с целью профилактики нежелательных кожных реакций и нарушений кровообращения.

При наличии варикозной болезни или других проблем с венами перед использованием изделия необходимо получить консультацию врача.

### Инструкция к применению:

Размер бандажа выбирается согласно таблице подбора изделий (верхняя треть голени, нижняя треть бедра). Бандаж Т-8592 надевается на ногу по типу чулка. Верхняя разъемная часть изделия фиксируется на бедре за счет панелей с застежками «Велкро», дополнительная фиксация нижнего края изделия обеспечивается лентой с застежками «Велкро». При надевании бандажа необходимо следить за тем, чтобы коленная чашечка была расположена прямо в отверстии изделия. Переднее ребро жесткости должно располагаться по боковым осям коленного сустава.

**Режим и сроки ношения определяются лечащим врачом или специалистом.**

**При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу. Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

### Уход за изделием и хранение:

- перед стиркой необходимо застегнуть все застежки «Велкро»;
- изделие можно стирать по мере загрязнения вручную, в теплом мыльном растворе (при температуре не выше 40 градусов по Цельсию);
- не применять машинную стирку;
- не стирать совместно с другим бельем или изделиями (особенно имеющими ворсистую структуру или подверженными возникновению зацепок);
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- не рекомендуется выкручивать или сильно отжимать изделие;
- сушить в расправленном виде на открытом воздухе вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

**Гарантийные обязательства распространяются при условии соблюдения правил хранения, использования и ухода за изделием.**

**Состав:** хлопок - 40%, полиамид - 25%, полиэстер - 15%, эластан - 10%, пенополиуретан - 10%, ребра - сталь.

Размер изделия	1(S)	1(S+)	2(M)	2(M+)	3(L)	3(L+)	4(XL)	4(XL+)	5(XXL)	5(XXL+)
Верхняя треть голени*, см	29-33	29-33	33-37	33-37	37-41	37-41	41-45	41-45	45-49	45-49
Нижняя треть бедра*, см	36-40	40-44	40-44	44-48	44-48	48-52	52-56	56-60	60-64	64-68

\*Измерение снимается сантиметровой лентой на 15 см выше и ниже середины надколенника.

Бандажи компрессионные фиксирующие - «ТРИВЕС» по ТУ 9396-003-85557773-2008 в следующих исполнениях:  
Бандаж компрессионный на коленный сустав БККС «ТРИВЕС» (вид 106460).  
РУ №ФСР 2008/03742 от 19.09.2016 г.

#### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи, срок хранения 5 лет.



Дата выпуска Штамм <b>УЛАКОВЩИК МЗ</b>				
Дата продаж Штамп торг. организации <b>ОТК</b> <b>ИПР 2019</b>				