

БАНДАЖ КОМПРЕССИОННЫЙ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ БККС – «ТРИВЕС»

Модель: Т-8535

Особенности:

- мягкий прочный воздухопроницаемый материал комфортен при длительном применении
- состоит из трех панелей для индивидуальной регулировки изделия по ноге
- снабжен 2-мя моделируемыми шинами по боковым поверхностям и 1-ой по задней поверхности
- система из 4-х усиливающих лент с застежками «Велкро» обеспечивает надежную фиксацию бандажа на конечности

Функции:

- иммобилизация коленного сустава в функционально выгодном положении
- стабилизация и фиксация коленного сустава

Назначение:

- острые травмы коленного сустава и надколенника
- иммобилизация коленного сустава после оперативных вмешательств и гипсовой повязки
- гемартроз, пателлофemorальный болевой синдром
- в качестве шины при транспортной иммобилизации
- в качестве альтернативы гипсовой повязке (по назначению врача)

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования сустава
- злокачественные новообразования в области использования бандажа
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие
- тромбофлебит вен в области применения бандажа

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению:

- одевается непосредственно на нижнюю конечность
- расположение боковых шин и моделирование шин выполняется врачом
- степень фиксации регулируется дополнительными лентами
- режим, сроки ношения и степень фиксации определяются врачом

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- перед стиркой отстегнуть панели и вынуть шины из карманов
- рекомендована ручная стирка при температуре 30°C, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку
- после стирки тщательно прополоскать бандаж
- не тереть и не выжимать изделие
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей

Состав: пенополиуретан – 40%, полиамид – 30%, полиэстер – 30%, шины – алюминий.

Бандажи компрессионные фиксирующие – «ТРИВЕС»

по ТУ 9396-003-85557773-2008 в следующих исполнениях:

Бандаж компрессионный на коленный сустав БККС-«ТРИВЕС» (вид 106460).

РУ № ФСР 2008/03742 от 19.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи, срок хранения 5 лет.

Производитель – уполномоченная организация по принятию претензий: ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ», Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru



ISO 13485-2003

