

Купить медицинский полимерный поильник можно на сайте <https://medik-dom.ru>

Инструкция по эксплуатации .

## **Поильник полимерный**

Описание: Поильник изготовлен из полипропилена и предназначен для приема пищи через рот. Поильник представляет собой неразборное пластмассовое изделие с носиком и двумя ручками по бокам.

Применение:

Поильник предназначен для приема напитков, и жидкой пищи через носик. При приеме жидкости (пищи) две ручки расположенные по бокам позволяют крепко и удобно удерживать изделие в руках. Перегородка, расположенная в верхней части изделия, предотвращает поливание жидкости в наклонном состоянии. После использования дезинфицировать одним из указанных ниже способом.

### **Обработка и дезинфекция :**

Все новые изделия следует продезинфицировать. Дезинфекция проводится кипячением. Не допускается использование средств, содержащих абразивы.

### **Особые указания:**

**Запрещается проводить стерилизацию в автоклаве!**

Ограничения в применении:

Не следует использовать поильник у больных с нарушениями акта глотания!  
Не использовать в микроволновой печи!