

**АРМЕД®**

NON PROGREDI, EST REGREDI

*Доска для пересадки**«Armed» FS-1*

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!



Доска для пересадки «Armed» FS-1 (далее по Руководству - доска) предназначена для более удобного перемещения или пересадки пользователей.

Для того, чтобы исключить вероятность повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Длина ($\pm 5\%$), мм	Ширина ($\pm 5\%$), мм	Допустимая нагрузка, кг	Масса ($\pm 5\%$), кг
710	210	110 \pm 1	1,2

Доска изготовлена из особо прочного легко моющегося пластика, нейтрального к воздействию воды.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием доску необходимо устойчиво установить на ровную горизонтальную поверхность.

При посадке пользователя убедитесь, чтобы основание не соскользнуло и не привело к травмированию пользователя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

При эксплуатации доска требует определенного технического ухода. Доска не подвержена коррозии при контакте с водой, что облегчает санитарную обработку.

При мытье допустимо использование воды и моющих средств. Не используйте растворители (ацетон, спирт и т. п.) и абразивные средства. После санитарной обработки вытрите доску насухо.

Следует предохранять доску от ударов твердыми и острыми предметами. Не подвергайте доску длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Доска в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Доску транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение доски без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность доски. Повреждения доски, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Доска не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация доски осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Доска _____ 1 шт.

Руководство _____ 1 экз

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции доски, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Доска для пересадки «Armed» FS-1 соответствует нормативно-технической документации и признана годной для эксплуатации.

Произведено : «Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, LTD»,

5 Xingfu Rd., zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

"Фошан Донгфэнг Медикал Эквипмент Мануфактори, (Лтд.)",

5 Ксингфу Рд, зона А, Шишан Индустриал Парк, Нанхай Дистрикт, Фошан Сити, Китай