



ARMEД®

NON PROGREDI. EST REGREDI

ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Размер L

Размер M

Размер S



Поручни пластиковые FS

МедТехНИК.ру

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ВВЕДЕНИЕ

Поручни пластиковые, модель FS (размер S, M, L) (далее по Руководству - поручни) предназначены для облегчения перемещения, служат дополнительной опорой, как в общественных зданиях, так и в домашних условиях на стенах коридоров, санузлов, душевых комнат.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Поручни запрещается использовать не по назначению: сидеть, прыгать и т.п.;
- Поручни должны быть надежно закреплены на ровной поверхности;
- Поручни должны быть установлены так, чтобы не препятствовать свободному доступу в помещение любому пользователю;
- Не превышайте грузоподъемность поручней;
- Используйте тип крепежа, рассчитанный под данную грузоподъемность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	S	M	L
Габариты (ДхДиам) ($\pm 5\%$), мм	470×80×85	570×80×85	670×80×85
Длина для захвата ($\pm 5\%$), мм	300	400	500
Масса ($\pm 5\%$), кг	0,43	0,56	0,64
Допустимая нагрузка, кг	150	150	150
Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ) ($\pm 5\%$), мм	490×470×220	590×460×220	690×470×220

- Поручни изготовлены из ударопрочного АБС пластика.

ОПИСАНИЕ



Схема крепежа

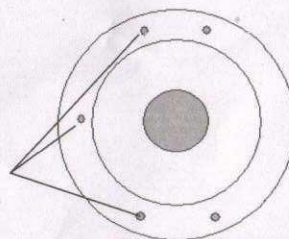


Рис. 1

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

При установке поручней необходимо учесть максимально удобное положение для их использования.

Подготовьте поверхность стены, согласно схеме крепления (рис. 1), и учитывая длину поручня. В соответствующих местах сделайте отверстия требуемой глубины, установите дюбеля для кирпичных и бетонных стен, и зафиксируйте поручень саморезами, при этом конструкция не должна иметь люфтов.

Поручень готов к эксплуатации.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Произведите дезинфекцию поручней в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности поручней обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Поручни в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Поручни транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение поручней без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность поручней. Повреждения поручней, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Поручни не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация поручней осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Поручень _____ 1 шт.
2. Комплект крепежа _____ 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции поручней, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Поручни пластиковые, модель FS (размер S, M, L) соответствуют нормативно-технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Изготовитель: "Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, (Ltd.)",

5 Xingfu RD, zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

"Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфактори (Лтд)",

5 Ксингфу РД, зона А, Шишан Индустриал Парк, Нанхай Дистрикт, Фошан Сити, Китай