

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель бытовая для ванной комнаты

Ступень-2, ступень с поручнем-2

ВВЕДЕНИЕ

Мебель бытовая для ванной комнаты : ступень-2, ступень с поручнем-2 (далее по Руководству - ступенька) предназначена для преодоления препятствий.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользования или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	ступень с поручнем-2	ступень-2
Габариты (ДхШхВ) ($\pm 5\%$), мм	425x390x1050	405x390x285
Габариты опорной поверхности (ДхШ) ($\pm 5\%$), мм	405x205	405x205
Высота опорной поверхности ($\pm 5\%$), мм	155/285	155/285
Масса нетто/брутто (1 шт./2 шт.) ($\pm 5\%$), кг	3,9/8,1	3/6,3
Грузоподъемность, кг	120	120
Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ) ($\pm 5\%$), мм	820x275x140	415x415x100

Каркас (опоры) выполнен из профильной трубы, имеет экологически чистое полимерно-порошковое покрытие, стойкое к любым видам санобработки. На видимых торцах труб – пластиковые заглушки.

Поручень (для модели с поручнем) выполнен из круглой трубы, имеет полимерно-порошковое покрытие, стойкое к любым видам санобработки. На видимых торцах труб – пластиковые заглушки.

Верхняя часть ступеньки выполнена из фанеры, слоя пенополиуретана, обтянута винилискожей.

Фурнитура: болт, шайба, гайка покрытие оцинкованное.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не превышайте грузоподъемность ступенек;
- Не устанавливайте ступеньки на наклонной поверхности;
- Устанавливайте ступеньку только на ровную, не скользящую поверхность;
- Не ставьте на ступеньку посторонние предметы с целью увеличения ее высоты;
- При использовании ступеньки рекомендуем устанавливать специальные поручни для поддержания координации и равновесия;
- Перед каждым использованием проверяйте ступеньки на наличие механических повреждений, надежность крепления всех элементов, отсутствие люфтов и качаний, отсутствие вблизи токоведущих элементов и т.д.;

- При пользовании ступенькой, руки должны быть свободны;
- Тщательно удаляйте любую грязь, которая скапливается в канавках протектора.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Прикрепите одну боковину с правой стороны, другую боковину с левой стороны ступеньки при помощи болтов.
2. Прикрепите поручень (для модели с поручнем) к ступеньке при помощи болтов М6х35 и гаек М6.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производите дезинфекцию ступенек в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности ступенек обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Ступеньки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Ступеньки транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение ступенек без упаковки завода-изготовителя не гарантирует их сохранность. Повреждения ступенек в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

Ступеньки не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация ступенек осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Боковина металлическая _____ 2 шт.
2. Основание _____ 2 шт.
3. Комплект крепежа _____ 1 уп.
4. Поручень (для модели с поручнем) _____ 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции ступеньки, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Мебель бытовая для ванной комнаты : ступень-2, ступень с поручнем-2 соответствует нормативно-технической документации и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления

Штамп ОТК

СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИИ

Срок службы - не менее 2 лет.

Гарантийный срок - 6 месяцев со дня отгрузки потребителю или со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 12 месяцев со дня изготовления.