

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Кресло-туалет для инвалидов с санитарным оснащением, модель: Н027В, т.м. «Armed» соответствует нормативно-технической документации и признан годным для эксплуатации.

Произведено: Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., Ltd.,

Danyang, 212310, Jiangsu, China

"Янгсу Ююе Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд",

Даньянг, 212310, Джангсу, Китай

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.



ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*До начала эксплуатации подробно
ознакомьтесь с настоящим
Руководством!*



*Кресло-туалет
для инвалидов с санитарным
оснащением, модель:
Н027В т.м. «Armed»*

ВВЕДЕНИЕ

Кресло-туалет для инвалидов с санитарным оснащением, модель: Н027В, т.м. «Armed» (далее по Руководству - кресло-туалет) используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для транспортировки пользователей.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Величина
Габариты в рабочем состоянии ($\pm 5\%$), мм	490x530x750-880
Ширина сиденья ($\pm 5\%$), мм	390
Глубина сиденья ($\pm 5\%$), мм	360
Высота сиденья ($\pm 5\%$), мм	410-530
Ширина между поручнями ($\pm 5\%$), мм	460
Высота спинки ($\pm 5\%$), мм	370
Масса ($\pm 5\%$), кг	5,1
Допустимая нагрузка, кг	110

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-туалета;
 - Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на кресло-туалет, а также наклоне на угол более 10 градусов, повышается опасность опрокидывания;
 - Не превышайте грузоподъемность кресла-туалета;
 - Прежде чем в одиночку выполнить какое-то незнакомое действие по использованию кресла-туалета, сделайте его под чьим-либо присмотром;
 - Не тянитесь за чем-либо через спинку кресла-туалета – велик риск опрокинуть кресло-туалет;
 - Устанавливайте кресло-туалет на ровную горизонтальную поверхность;
- Сопровождающее лицо должно:**
- предупреждать пользователя о планируемых действиях, особенно при наклоне кресла-туалета;
 - ни в коем случае не наклонять кресло-туалет вперед;
 - проводить регулярные осмотры кресла-туалета.



Подлокотники кресла-туалета - прямые, несъемные. Подлокотники оснащены пластиковыми накладками.

Рама кресла-туалета изготовлена из пластика.

Высота кресла-туалета регулируется кнопочным фиксатором через каждые 25 мм.

Ножки кресла-туалета выполнены из алюминия, оснащены резиновыми противоскользящими наконечниками.

Сиденье и санитарная емкость - съемные, изготовлены из легкомоющегося пластика.

Наклон спинки кресла-туалета составляет 120 градусов, что обеспечивает оптимальное положение стульчака в открытом положении.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кресло-туалет собирается без инструментов.

Соберите кресло путем соединения отдельных частей конструкции и фиксируется кнопочными фиксаторами.

Установите необходимую высоту кресла-туалета с помощью кнопочных фиксаторов.

Для устойчивости выбирайте одинаковую высоту для всех ножек.

Мягкую накладку на спинку зафиксируйте пластиковыми фиксаторами.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистите судно щеткой, антибактериальным моющим средством и водой (не пользуйтесь губкой и отбеливателем), по возможности, используйте дезинфицирующий спрей. Затем верните санитарное устройство на место, снимите перчатки и хорошо вымойте руки.

Каждые две недели нужно проверять кресло-туалет на предмет повреждений: на раме, санитарном устройстве и наконечниках не должно быть трещин; все винты, болты и гайки должны быть туго закручены. В случае неисправностей ни в коем случае не пользуйтесь креслом-туалетом и не занимайтесь ремонтом самостоятельно - исправлением технических проблем должны заниматься специалисты.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Кресло-туалет в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

Кресло-туалет транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение кресла-туалета без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность кресла-туалета. Повреждения кресла-туалета, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Кресло-туалет не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация кресла-туалета осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кресло-туалет _____ 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции кресла-туалета, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.