

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Изделие санитарно-гигиенического назначения из пластика: ночной горшок, в комплекте со складной подставкой и стульчиком, модель: FS897A, т.м. «Armed»



Обратитесь к
Руководству по эксплуатации



Выбросить в урну



Знак соответствия




Верх



Хрупкий груз



Беречь от влаги

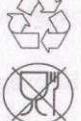

Вторичная переработка



Не употреблять в пищу

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ВВЕДЕНИЕ

Изделие санитарно-гигиенического назначения из пластмасс: ночной горшок, в комплекте со складной подставкой и стульчиком, модель: FS897A, т.м. «Armed» (далее по Руководству - изделие) предназначен для использования в качестве санитарно-гигиенического приспособления.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пациента или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Величина
Габариты в рабочем состоянии ($\pm 5\%$), мм	410x380x420
Габариты в сложенном состоянии ($\pm 5\%$), мм	610x110x410
Ширина сиденья ($\pm 5\%$), мм	380
Глубина сиденья ($\pm 5\%$), мм	410
Высота сиденья ($\pm 5\%$), мм	400
Масса ($\pm 5\%$), кг	2,4
Допустимая нагрузка, кг	90

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей изделия;
- Имейте ввиду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на изделие, а также наклоне на угол более 10 градусов, повышается опасность опрокидывания;
- Не превышайте допустимую нагрузку на изделие;
- Устанавливайте изделие на ровной горизонтальной поверхности;
- Проводите регулярные осмотры изделия.

ОПИСАНИЕ

Рама изделия изготовлена из металла и имеет защитное покрытие.

Ножки изделия оснащены противоскользящими наконечниками.

Сиденье и санитарная емкость - изготовлены из легкомоющегося пластика, санитарная емкость - легкосъемная.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие собирается без использования инструмента.

Изделие поставляется в сложенном виде. Для раскладывания изделия возьмитесь одной рукой за заднюю направляющую рамы, другой рукой - за переднюю, и разведите их друг от друга до упора так, чтобы фиксирующий винт верхней перекладины попал в отверстие нижней перекладины. Зафиксируйте данное положение винта с помощью рычага.

Санитарную емкость установите на опоры сзади рамы под сиденьем.

Складывание изделия осуществляется в обратном порядке.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наружные поверхности BPLTKBZ обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Изделие транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение изделия без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность изделия. Повреждения изделия, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Изделие не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация изделия осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. Рама изделия | 1 шт. |
| 2. Санитарная емкость | 1 шт. |
| 3. Руководство | 1 экз. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции изделия, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие санитарно-гигиенического назначения из пластмасс: ночной горшок, в комплекте со складной подставкой и стульчиком, модель: FS897A, т.м. «Armed» соответствует нормативно-технической документации и признан годным для эксплуатации.

Произведено: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, LTD.,

5 Xingfu Rd, zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

"Фошан Донгфэн Медикал Эквилипмент Мануфактори (Лтд)"

5 Ксингфу Рд, зона А, Шишан Индустрис Парк, Нанхай Дистрикт, Фошан Сити, Китай

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.