



АРМЕД®

NON PROGREDI, EST REGREDI

ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации
подробно ознакомьтесь с настоящим
Руководством!



CQD-P



CQD-J-T



CQD-J-P



CQD-J-F

Средства специальные
для самообслуживания и ухода за инва-
лидами: подушка противопролежневая
«Armed»

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Подушка в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Подушку транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение подушки без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность подушки. Повреждения подушки, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Подушка не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация подушки осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Подушка _____ 1 шт.
2. Руководство _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции подушки, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Средства специальные для самообслуживания и ухода за инвалидами: подушки противопролежневые «Armed»: CQD-P, CQD-J-P, CQD-J-T, CQD-J-F соответствуют техническим условиям и признаны годными для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10226 от 20.07.2011 г.

Изготовитель: Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd.,

№17 Danfeng West Road, Jintan City, Jiangsu Province, 213200, China

"Джиангсу Дэнгван Медикал Тритмент Ко.Лтд",

№17 Данфенг Вест Род, город Джинтан, провинция Джангсу, 213200, Китай

ВВЕДЕНИЕ

Средства специальные для самообслуживания и ухода за инвалидами: подушки противопролежневые «Armed»: CQD-P, CQD-J-P, CQD-J-T, CQD-J-F (далее по Руководству - подушки) предназначены для предотвращения образования пролежней у людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и людей, ведущих сидячий образ жизни в целях снижения нагрузки на нижнюю часть позвоночника.

Противопролежневый эффект достигается за счет равномерного распределения давления на участки тела, благодаря внутренним слоям с разной плотностью, вследствие чего значительно снижается нагрузка на позвоночник в частности - крестец.

Может использоваться в инвалидном кресле, офисном кресле, водительском сиденье.

Медицинские показания и противопоказания устанавливаются врачом.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	CQD-P	CQD-J-T	CQD-J-P	CQD-J-F
Габариты (ДхШхВ) ($\pm 5\%$), мм	400x380x70	400x390x50	400x380x50	400x390x50
Масса (нетто) ($\pm 5\%$), кг	0,4	0,65	0,95	1,2
Грузоподъемность, кг	120	120	120	120

- Мод. CQD-P противопролежневая подушка, надувная, трубчатая изготовлена из непромокаемой ткани.

-Мод. CQD-J-P, CQD-J-T, CQD-J-F наполнитель из вязкоэластичного полиуретана с эффектом запоминания формы.

- Гелевая прослойка мод. CQD-J-F обеспечивает эффект охлаждения для пользователя.

-Мод. CQD-J-P, CQD-J-T чехол на молнии, из ткани с водоотталкивающим свойством.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатируйте подушку только в чехле во избежание потери ее свойств;
- Берегите подушку от попадания жидкостей и химикатов;
- Избегать контакта с поверхностью подушки острых, колющих и режущих предметов.
- Не превышайте грузоподъемность подушки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Предназначена для эксплуатации как внутри помещения, так и на улице.
- Чистка подушки: протереть подушку мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, после чего протереть повторно влажной тканью без моющего средства.

Просушить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от отопительных приборов и источников открытого огня или на открытом воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Чистка чехла:

Чехол съемный.

Стирать его можно как ручным способом, так и в стиральной машине.

Температура воды при стирке не выше 40 градусов. Использовать порошки для деликатной стирки.