

Облучатель бактерицидный рециркулятор
«ВОБ 2-15 эконом»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного ультрафиолетового облучения.

- В качестве источников бактерицидного излучения используются бактерицидные ультрафиолетовые лампы, не продуцирующие озон, что позволяет использовать рециркулятор в больницах, учебных и образовательных учреждениях, в офисных и промышленных помещениях в присутствии людей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рециркулятор работает от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +/- 22) В, частотой 50 Гц.
- Облученность от источников УФ-излучения на расстоянии 5 см в эффективном спектральном диапазоне (220-280) нм не менее 50 Вт/м кв.

- В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах применены бактерицидные лампы, не продуцирующие озон с длиной волны 253,7 нм, следующих марок: PHILIPS TUV 15W G13, OSRAM 15W G13, HRA LT 15W/UV-C.

- Рециркулятор обеспечивает ежедневную непрерывную работу в течение 8 часов. Перерыв между включениями не регламентирован.

- Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 минуты.

- Корректированный уровень звуковой мощности в рециркуляторах не более 32 дБА.

- По электробезопасности рециркулятор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнены по классу защиты 1 тип Н.

- Производительность рециркулятора (объем воздуха, проходящий через рециркулятор и обеззараживаемый им за один час) при номинальном напряжении 70 +/- 10 куб. м/час.

- Габаритные размеры рециркулятора не более (600x160x122) мм. Масса не более 2 кг. Материал корпуса выполнен из стали окрашенной порошковой краской.

- Рециркулятор в передвижном исполнении комплектуются подставкой (опорой).

- Наружные поверхности рециркулятора допускают дезинфекцию способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

- Пускорегулирующая аппаратура выполнена по электронной схеме.

- Подключение рециркулятора к сети питания осуществляется с помощью трехпроводного сетевого кабеля, один из проводов которого заземляющий.

- Выключатель электропитания двухпозиционный «Вкл», «Выкл», при включении которого рециркулятор входит в режим постоянной работы. Режим работы «постоянная работа в присутствии людей».

- Средний срок службы рециркулятора не менее 5 лет. Гарантий срок службы рециркулятора 12 месяцев.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Облучатель бактерицидный рециркулятор «ВОБ 2-15» для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей
- 1 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 экз.

**ВНИМАНИЕ! ИНДИКАТОРОМ РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПЫ ЯВЛЯЕТСЯ СВЕЧЕНИЕ ЕЁ КОЛБЫ!
ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить ремонт рециркулятора и их дезинфекционную обработку, если они подключены к сети!

Во избежание ожога глаз, который может быть вызван ультрафиолетовыми лучами, запрещается включать рециркулятор при снятом кожухе!

РОСАККРЕДИТАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ № 0002626

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.11MH06 выдан 06 августа 2015 г.

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью "Центр сертификации продукции "Стандарт-Сертилит", ИНН: 7701881790
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 6, этаж 3, комната 15

и удостоверяет, что Орган по сертификации ООО "Центр сертификации продукции "Стандарт-Сертилит"
105082, Россия, Москва, ул. Почтовая Б., 55/59, 1, офис 414

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 в качестве Органа по сертификации

аккредитован в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 16 июля 2015 г.

Руководитель (заместитель Руководителя) М.А. Якутова
Федеральной службы по аккредитации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU МН06 Н00159120
Срок действия 21.05.2020
№ 0534165
20.05.2023

ПРОДУКЦИЯ
Универсальный обеззараживающий рециркулятор воздуха для помещений: ВОБ 2-15
ВОБ 2-15-001, ВОБ 2-15-002, ВОБ 2-15-003, ВОБ 2-15-004, ВОБ 2-15-005, ВОБ 2-15-006, ВОБ 2-15-007, ВОБ 2-15-008, ВОБ 2-15-009, ВОБ 2-15-010, ВОБ 2-15-011, ВОБ 2-15-012, ВОБ 2-15-013, ВОБ 2-15-014, ВОБ 2-15-015, ВОБ 2-15-016, ВОБ 2-15-017, ВОБ 2-15-018, ВОБ 2-15-019, ВОБ 2-15-020, ВОБ 2-15-021, ВОБ 2-15-022, ВОБ 2-15-023, ВОБ 2-15-024, ВОБ 2-15-025, ВОБ 2-15-026, ВОБ 2-15-027, ВОБ 2-15-028, ВОБ 2-15-029, ВОБ 2-15-030, ВОБ 2-15-031, ВОБ 2-15-032, ВОБ 2-15-033, ВОБ 2-15-034, ВОБ 2-15-035, ВОБ 2-15-036, ВОБ 2-15-037, ВОБ 2-15-038, ВОБ 2-15-039, ВОБ 2-15-040, ВОБ 2-15-041, ВОБ 2-15-042, ВОБ 2-15-043, ВОБ 2-15-044, ВОБ 2-15-045, ВОБ 2-15-046, ВОБ 2-15-047, ВОБ 2-15-048, ВОБ 2-15-049, ВОБ 2-15-050, ВОБ 2-15-051, ВОБ 2-15-052, ВОБ 2-15-053, ВОБ 2-15-054, ВОБ 2-15-055, ВОБ 2-15-056, ВОБ 2-15-057, ВОБ 2-15-058, ВОБ 2-15-059, ВОБ 2-15-060, ВОБ 2-15-061, ВОБ 2-15-062, ВОБ 2-15-063, ВОБ 2-15-064, ВОБ 2-15-065, ВОБ 2-15-066, ВОБ 2-15-067, ВОБ 2-15-068, ВОБ 2-15-069, ВОБ 2-15-070, ВОБ 2-15-071, ВОБ 2-15-072, ВОБ 2-15-073, ВОБ 2-15-074, ВОБ 2-15-075, ВОБ 2-15-076, ВОБ 2-15-077, ВОБ 2-15-078, ВОБ 2-15-079, ВОБ 2-15-080, ВОБ 2-15-081, ВОБ 2-15-082, ВОБ 2-15-083, ВОБ 2-15-084, ВОБ 2-15-085, ВОБ 2-15-086, ВОБ 2-15-087, ВОБ 2-15-088, ВОБ 2-15-089, ВОБ 2-15-090, ВОБ 2-15-091, ВОБ 2-15-092, ВОБ 2-15-093, ВОБ 2-15-094, ВОБ 2-15-095, ВОБ 2-15-096, ВОБ 2-15-097, ВОБ 2-15-098, ВОБ 2-15-099, ВОБ 2-15-100, ВОБ 2-15-101, ВОБ 2-15-102, ВОБ 2-15-103, ВОБ 2-15-104, ВОБ 2-15-105, ВОБ 2-15-106, ВОБ 2-15-107, ВОБ 2-15-108, ВОБ 2-15-109, ВОБ 2-15-110, ВОБ 2-15-111, ВОБ 2-15-112, ВОБ 2-15-113, ВОБ 2-15-114, ВОБ 2-15-115, ВОБ 2-15-116, ВОБ 2-15-117, ВОБ 2-15-118, ВОБ 2-15-119, ВОБ 2-15-120, ВОБ 2-15-121, ВОБ 2-15-122, ВОБ 2-15-123, ВОБ 2-15-124, ВОБ 2-15-125, ВОБ 2-15-126, ВОБ 2-15-127, ВОБ 2-15-128, ВОБ 2-15-129, ВОБ 2-15-130, ВОБ 2-15-131, ВОБ 2-15-132, ВОБ 2-15-133, ВОБ 2-15-134, ВОБ 2-15-135, ВОБ 2-15-136, ВОБ 2-15-137, ВОБ 2-15-138, ВОБ 2-15-139, ВОБ 2-15-140, ВОБ 2-15-141, ВОБ 2-15-142, ВОБ 2-15-143, ВОБ 2-15-144, ВОБ 2-15-145, ВОБ 2-15-146, ВОБ 2-15-147, ВОБ 2-15-148, ВОБ 2-15-149, ВОБ 2-15-150, ВОБ 2-15-151, ВОБ 2-15-152, ВОБ 2-15-153, ВОБ 2-15-154, ВОБ 2-15-155, ВОБ 2-15-156, ВОБ 2-15-157, ВОБ 2-15-158, ВОБ 2-15-159, ВОБ 2-15-160, ВОБ 2-15-161, ВОБ 2-15-162, ВОБ 2-15-163, ВОБ 2-15-164, ВОБ 2-15-165, ВОБ 2-15-166, ВОБ 2-15-167, ВОБ 2-15-168, ВОБ 2-15-169, ВОБ 2-15-170, ВОБ 2-15-171, ВОБ 2-15-172, ВОБ 2-15-173, ВОБ 2-15-174, ВОБ 2-15-175, ВОБ 2-15-176, ВОБ 2-15-177, ВОБ 2-15-178, ВОБ 2-15-179, ВОБ 2-15-180, ВОБ 2-15-181, ВОБ 2-15-182, ВОБ 2-15-183, ВОБ 2-15-184, ВОБ 2-15-185, ВОБ 2-15-186, ВОБ 2-15-187, ВОБ 2-15-188, ВОБ 2-15-189, ВОБ 2-15-190, ВОБ 2-15-191, ВОБ 2-15-192, ВОБ 2-15-193, ВОБ 2-15-194, ВОБ 2-15-195, ВОБ 2-15-196, ВОБ 2-15-197, ВОБ 2-15-198, ВОБ 2-15-199, ВОБ 2-15-200, ВОБ 2-15-201, ВОБ 2-15-202, ВОБ 2-15-203, ВОБ 2-15-204, ВОБ 2-15-205, ВОБ 2-15-206, ВОБ 2-15-207, ВОБ 2-15-208, ВОБ 2-15-209, ВОБ 2-15-210, ВОБ 2-15-211, ВОБ 2-15-212, ВОБ 2-15-213, ВОБ 2-15-214, ВОБ 2-15-215, ВОБ 2-15-216, ВОБ 2-15-217, ВОБ 2-15-218, ВОБ 2-15-219, ВОБ 2-15-220, ВОБ 2-15-221, ВОБ 2-15-222, ВОБ 2-15-223, ВОБ 2-15-224, ВОБ 2-15-225, ВОБ 2-15-226, ВОБ 2-15-227, ВОБ 2-15-228, ВОБ 2-15-229, ВОБ 2-15-230, ВОБ 2-15-231, ВОБ 2-15-232, ВОБ 2-15-233, ВОБ 2-15-234, ВОБ 2-15-235, ВОБ 2-15-236, ВОБ 2-15-237, ВОБ 2-15-238, ВОБ 2-15-239, ВОБ 2-15-240, ВОБ 2-15-241, ВОБ 2-15-242, ВОБ 2-15-243, ВОБ 2-15-244, ВОБ 2-15-245, ВОБ 2-15-246, ВОБ 2-15-247, ВОБ 2-15-248, ВОБ 2-15-249, ВОБ 2-15-250, ВОБ 2-15-251, ВОБ 2-15-252, ВОБ 2-15-253, ВОБ 2-15-254, ВОБ 2-15-255, ВОБ 2-15-256, ВОБ 2-15-257, ВОБ 2-15-258, ВОБ 2-15-259, ВОБ 2-15-260, ВОБ 2-15-261, ВОБ 2-15-262, ВОБ 2-15-263, ВОБ 2-15-264, ВОБ 2-15-265, ВОБ 2-15-266, ВОБ 2-15-267, ВОБ 2-15-268, ВОБ 2-15-269, ВОБ 2-15-270, ВОБ 2-15-271, ВОБ 2-15-272, ВОБ 2-15-273, ВОБ 2-15-274, ВОБ 2-15-275, ВОБ 2-15-276, ВОБ 2-15-277, ВОБ 2-15-278, ВОБ 2-15-279, ВОБ 2-15-280, ВОБ 2-15-281, ВОБ 2-15-282, ВОБ 2-15-283, ВОБ 2-15-284, ВОБ 2-15-285, ВОБ 2-15-286, ВОБ 2-15-287, ВОБ 2-15-288, ВОБ 2-15-289, ВОБ 2-15-290, ВОБ 2-15-291, ВОБ 2-15-292, ВОБ 2-15-293, ВОБ 2-15-294, ВОБ 2-15-295, ВОБ 2-15-296, ВОБ 2-15-297, ВОБ 2-15-298, ВОБ 2-15-299, ВОБ 2-15-300, ВОБ 2-15-301, ВОБ 2-15-302, ВОБ 2-15-303, ВОБ 2-15-304, ВОБ 2-15-305, ВОБ 2-15-306, ВОБ 2-15-307, ВОБ 2-15-308, ВОБ 2-15-309, ВОБ 2-15-310, ВОБ 2-15-311, ВОБ 2-15-312, ВОБ 2-15-313, ВОБ 2-15-314, ВОБ 2-15-315, ВОБ 2-15-316, ВОБ 2-15-317, ВОБ 2-15-318, ВОБ 2-15-319, ВОБ 2-15-320, ВОБ 2-15-321, ВОБ 2-15-322, ВОБ 2-15-323, ВОБ 2-15-324, ВОБ 2-15-325, ВОБ 2-15-326, ВОБ 2-15-327, ВОБ 2-15-328, ВОБ 2-15-329, ВОБ 2-15-330, ВОБ 2-15-331, ВОБ 2-15-332, ВОБ 2-15-333, ВОБ 2-15-334, ВОБ 2-15-335, ВОБ 2-15-336, ВОБ 2-15-337, ВОБ 2-15-338, ВОБ 2-15-339, ВОБ 2-15-340, ВОБ 2-15-341, ВОБ 2-15-342, ВОБ 2-15-343, ВОБ 2-15-344, ВОБ 2-15-345, ВОБ 2-15-346, ВОБ 2-15-347, ВОБ 2-15-348, ВОБ 2-15-349, ВОБ 2-15-350, ВОБ 2-15-351, ВОБ 2-15-352, ВОБ 2-15-353, ВОБ 2-15-354, ВОБ 2-15-355, ВОБ 2-15-356, ВОБ 2-15-357, ВОБ 2-15-358, ВОБ 2-15-359, ВОБ 2-15-360, ВОБ 2-15-361, ВОБ 2-15-362, ВОБ 2-15-363, ВОБ 2-15-364, ВОБ 2-15-365, ВОБ 2-15-366, ВОБ 2-15-367, ВОБ 2-15-368, ВОБ 2-15-369, ВОБ 2-15-370, ВОБ 2-15-371, ВОБ 2-15-372, ВОБ 2-15-373, ВОБ 2-15-374, ВОБ 2-15-375, ВОБ 2-15-376, ВОБ 2-15-377, ВОБ 2-15-378, ВОБ 2-15-379, ВОБ 2-15-380, ВОБ 2-15-381, ВОБ 2-15-382, ВОБ 2-15-383, ВОБ 2-15-384, ВОБ 2-15-385, ВОБ 2-15-386, ВОБ 2-15-387, ВОБ 2-15-388, ВОБ 2-15-389, ВОБ 2-15-390, ВОБ 2-15-391, ВОБ 2-15-392, ВОБ 2-15-393, ВОБ 2-15-394, ВОБ 2-15-395, ВОБ 2-15-396, ВОБ 2-15-397, ВОБ 2-15-398, ВОБ 2-15-399, ВОБ 2-15-400, ВОБ 2-15-401, ВОБ 2-15-402, ВОБ 2-15-403, ВОБ 2-15-404, ВОБ 2-15-405, ВОБ 2-15-406, ВОБ 2-15-407, ВОБ 2-15-408, ВОБ 2-15-409, ВОБ 2-15-410, ВОБ 2-15-411, ВОБ 2-15-412, ВОБ 2-15-413, ВОБ 2-15-414, ВОБ 2-15-415, ВОБ 2-15-416, ВОБ 2-15-417, ВОБ 2-15-418, ВОБ 2-15-419, ВОБ 2-15-420, ВОБ 2-15-421, ВОБ 2-15-422, ВОБ 2-15-423, ВОБ 2-15-424, ВОБ 2-15-425, ВОБ 2-15-426, ВОБ 2-15-427, ВОБ 2-15-428, ВОБ 2-15-429, ВОБ 2-15-430, ВОБ 2-15-431, ВОБ 2-15-432, ВОБ 2-15-433, ВОБ 2-15-434, ВОБ 2-15-435, ВОБ 2-15-436, ВОБ 2-15-437, ВОБ 2-15-438, ВОБ 2-15-439, ВОБ 2-15-440, ВОБ 2-15-441, ВОБ 2-15-442, ВОБ 2-15-443, ВОБ 2-15-444, ВОБ 2-15-445, ВОБ 2-15-446, ВОБ 2-15-447, ВОБ 2-15-448, ВОБ 2-15-449, ВОБ 2-15-450, ВОБ 2-15-451, ВОБ 2-15-452, ВОБ 2-15-453, ВОБ 2-15-454, ВОБ 2-15-455, ВОБ 2-15-456, ВОБ 2-15-457, ВОБ 2-15-458, ВОБ 2-15-459, ВОБ 2-15-460, ВОБ 2-15-461, ВОБ 2-15-462, ВОБ 2-15-463, ВОБ 2-15-464, ВОБ 2-15-465, ВОБ 2-15-466, ВОБ 2-15-467, ВОБ 2-15-468, ВОБ 2-15-469, ВОБ 2-15-470, ВОБ 2-15-471, ВОБ 2-15-472, ВОБ 2-15-473, ВОБ 2-15-474, ВОБ 2-15-475, ВОБ 2-15-476, ВОБ 2-15-477, ВОБ 2-15-478, ВОБ 2-15-479, ВОБ 2-15-480, ВОБ 2-15-481, ВОБ 2-15-482, ВОБ 2-15-483, ВОБ 2-15-484, ВОБ 2-15-485, ВОБ 2-15-486, ВОБ 2-15-487, ВОБ 2-15-488, ВОБ 2-15-489, ВОБ 2-15-490, ВОБ 2-15-491, ВОБ 2-15-492, ВОБ 2-15-493, ВОБ 2-15-494, ВОБ 2-15-495, ВОБ 2-15-496, ВОБ 2-15-497, ВОБ 2-15-498, ВОБ 2-15-499, ВОБ 2-15-500, ВОБ 2-15-501, ВОБ 2-15-502, ВОБ 2-15-503, ВОБ 2-15-504, ВОБ 2-15-505, ВОБ 2-15-506, ВОБ 2-15-507, ВОБ 2-15-508, ВОБ 2-15-509, ВОБ 2-15-510, ВОБ 2-15-511, ВОБ 2-15-512, ВОБ 2-15-513, ВОБ 2-15-514, ВОБ 2-15-515, ВОБ 2-15-516, ВОБ 2-15-517, ВОБ 2-15-518, ВОБ 2-15-519, ВОБ 2-15-520, ВОБ 2-15-521, ВОБ 2-15-522, ВОБ 2-15-523, ВОБ 2-15-524, ВОБ 2-15-525, ВОБ 2-15-526, ВОБ 2-15-527, ВОБ 2-15-528, ВОБ 2-15-529, ВОБ 2-15-530, ВОБ 2-15-531, ВОБ 2-15-532, ВОБ 2-15-533, ВОБ 2-15-534, ВОБ 2-15-535, ВОБ 2-15-536, ВОБ 2-15-537, ВОБ 2-15-538, ВОБ 2-15-539, ВОБ 2-15-540, ВОБ 2-15-541, ВОБ 2-15-542, ВОБ 2-15-543, ВОБ 2-15-544, ВОБ 2-15-545, ВОБ 2-15-546, ВОБ 2-15-547, ВОБ 2-15-548, ВОБ 2-15-549, ВОБ 2-15-550, ВОБ 2-15-551, ВОБ 2-15-552, ВОБ 2-15-553, ВОБ 2-15-554, ВОБ 2-15-555, ВОБ 2-15-556, ВОБ 2-15-557, ВОБ 2-15-558, ВОБ 2-15-559, ВОБ 2-15-560, ВОБ 2-15-561, ВОБ 2-15-562, ВОБ 2-15-563, ВОБ 2-15-564, ВОБ 2-15-565, ВОБ 2-15-566, ВОБ 2-15-567, ВОБ 2-15-568, ВОБ 2-15-569, ВОБ 2-15-570, ВОБ 2-15-571, ВОБ 2-15-572, ВОБ 2-15-573, ВОБ 2-15-574, ВОБ 2-15-575, ВОБ 2-15-576, ВОБ 2-15-577, ВОБ 2-15-578, ВОБ 2-15-579, ВОБ 2-15-580, ВОБ 2-15-581, ВОБ 2-15-582, ВОБ 2-15-583, ВОБ 2-15-584, ВОБ 2-15-585, ВОБ 2-15-586, ВОБ 2-15-587, ВОБ 2-15-588, ВОБ 2-15-589, ВОБ 2-15-590, ВОБ 2-15-591, ВОБ 2-15-592, ВОБ 2-15-593, ВОБ 2-15-594, ВОБ 2-15-595, ВОБ 2-15-596, ВОБ 2-15-597, ВОБ 2-15-598, ВОБ 2-15-599, ВОБ 2-15-600, ВОБ 2-15-601, ВОБ 2-15-602, ВОБ 2-15-603, ВОБ 2-15-604, ВОБ 2-15-605, ВОБ 2-15-606, ВОБ 2-15-607, ВОБ 2-15-608, ВОБ 2-15-609, ВОБ 2-15-610, ВОБ 2-15-611, ВОБ 2-15-612, ВОБ 2-15-613, ВОБ 2-15-614, ВОБ 2-15-615, ВОБ 2-15-616, ВОБ 2-15-617, ВОБ 2-15-618, ВОБ 2-15-619, ВОБ 2-15-620, ВОБ 2-15-621, ВОБ 2-15-622, ВОБ 2-15-623, ВОБ 2-15-624, ВОБ 2-15-625, ВОБ 2-15-626, ВОБ 2-15-627, ВОБ 2-15-628, ВОБ 2-15-629, ВОБ 2-15-630, ВОБ 2-15-631, ВОБ 2-15-632, ВОБ 2-15-633, ВОБ 2-15-634, ВОБ 2-15-635, ВОБ 2-15-636, ВОБ 2-15-637, ВОБ 2-15-638, ВОБ 2-15-639, ВОБ 2-15-640, ВОБ 2-15-641, ВОБ 2-15-642, ВОБ 2-15-643, ВОБ 2-15-644, ВОБ 2-15-645, ВОБ 2-15-646, ВОБ 2-15-647, ВОБ 2-15-648, ВОБ 2-15-649, ВОБ 2-15-650, ВОБ 2-15-651, ВОБ 2-15-652, ВОБ 2-15-653, ВОБ 2-15-654, ВОБ 2-15-655, ВОБ 2-15-656, ВОБ 2-15-657, ВОБ 2-15-658, ВОБ 2-15-659, ВОБ 2-15-660, ВОБ 2-15-661, ВОБ 2-15-662, ВОБ 2-15-663, ВОБ 2-15-664, ВОБ 2-15-665, ВОБ 2-15-666, ВОБ 2-15-667, ВОБ 2-15-668, ВОБ 2-15-669, ВОБ 2-15-670, ВОБ 2-15-671, ВОБ 2-15-672, ВОБ 2-15-673, ВОБ 2-15-674, ВОБ 2-15-675, ВОБ 2-15-676, ВОБ 2-15-677, ВОБ 2-15-678, ВОБ 2-15-679, ВОБ 2-15-680, ВОБ 2-15-681, ВОБ 2-15-682, ВОБ 2-15-683, ВОБ 2-15-684, ВОБ 2-15-685, ВОБ 2-15-686, ВОБ 2-15-687, ВОБ 2-15-688, ВОБ 2-15-689, ВОБ 2-15-690, ВОБ 2-15-691, ВОБ 2-15-692, ВОБ 2-15-693, ВОБ 2-15-694, ВОБ 2-15-695, ВОБ 2-15-696, ВОБ 2-15-697, ВОБ 2-15-698, ВОБ 2-15-699, ВОБ 2-15-700, ВОБ 2-15-701, ВОБ 2-15-702, ВОБ 2-15-703, ВОБ 2-15-704, ВОБ 2-15-705, ВОБ 2-15-706, ВОБ 2-15-707, ВОБ 2-15-708, ВОБ 2-15-709, ВОБ 2-15-710, ВОБ 2-15-711, ВОБ 2-15-712, ВОБ 2-15-713, ВОБ 2-15-714, ВОБ 2-15-715, ВОБ 2-15-716, ВОБ 2-15-717, ВОБ 2-15-718, ВОБ 2-15-719, ВОБ 2-15-720, ВОБ 2-15-721, ВОБ 2-15-722, ВОБ 2-15-723, ВОБ 2-15-724, ВОБ 2-15-725, ВОБ 2-15-726, ВОБ 2-15-727, ВОБ 2-15-728, ВОБ 2-15-729, ВОБ 2-15-730, ВОБ 2-15-731, ВОБ 2-15-732, ВОБ 2-15-733, ВОБ 2-15-734, ВОБ 2-15-735, ВОБ 2-15-736, ВОБ 2-15-737, ВОБ 2-15-738, ВОБ 2-15-739, ВОБ 2-15-740, ВОБ 2-15-741, ВОБ 2-15-742, ВОБ 2-15-743, ВОБ 2-15-744, ВОБ 2-15-745, ВОБ 2-15-746, ВОБ 2-15-747, ВОБ 2-15-748, ВОБ 2-15-749, ВОБ 2-15-750, ВОБ 2-15-751, ВОБ 2-15-752, ВОБ 2-15-753, ВОБ 2-15-754, ВОБ 2-15-755, ВОБ 2-15-756, ВОБ 2-15-757, ВОБ 2-15-758, ВОБ 2-15-759, ВОБ 2-15-760, ВОБ 2-15-761, ВОБ 2-15-762, ВОБ 2-15-763, ВОБ 2-15-764, ВОБ 2-15-765, ВОБ 2-15-766, ВОБ 2-15-767, ВОБ 2-15-768, ВОБ 2-15-769, ВОБ 2-15-770, ВОБ 2-15-771, ВОБ 2-15-772, ВОБ 2-15-773, ВОБ 2-15-774, ВОБ 2-15-775, ВОБ 2-15-776, ВОБ 2-15-777, ВОБ 2-15-778, ВОБ 2-15-779, ВОБ 2-15-780, ВОБ 2-15-781, ВОБ 2-15-782, ВОБ 2-15-783, ВОБ 2-15-784, ВОБ 2-15-785, ВОБ 2-15-786, ВОБ 2-15-787, ВОБ 2-15-788, ВОБ 2-15-789, ВОБ 2-15-790, ВОБ 2-15-791, ВОБ 2-15-792, ВОБ 2-15-793, ВОБ 2-15-794, ВОБ 2-15-795, ВОБ 2-15-796, ВОБ 2-15-797, ВОБ 2-15-798, ВОБ 2-15-799, ВОБ 2-15-800, ВОБ 2-15-801, ВОБ 2-15-802, ВОБ 2-15-803, ВОБ 2-15-804, ВОБ 2-15-805, ВОБ 2-15-806, ВОБ 2-15-807, ВОБ 2-15-808, ВОБ 2-15-809, ВОБ 2-15-810, ВОБ 2-15-811, ВОБ 2-15-812, ВОБ 2-15-813, ВОБ 2-15-814, ВОБ 2-15-815, ВОБ 2-15-816, ВОБ 2-15-817, ВОБ 2-15-818, ВОБ 2-15-819, ВОБ 2-15-820, ВОБ 2-15-821, ВОБ 2-15-822, ВОБ 2-15-823, ВОБ 2-15-824, ВОБ 2-15-825, ВОБ 2-15-826, ВОБ 2-15-827, ВОБ 2-15-828, ВОБ 2-15-829, ВОБ 2-15-830, ВОБ 2-15-831, ВО