

Рекомендации по применению аппарата АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ»

1. Порядок действий при подготовке:

- открутить крышку с трубкой подачи раствора ДС, придерживая трубку и извлечь емкость для дезинфицирующего средства;
- заполнить емкость дезинфицирующим средством (см. Таблицу 1);
- установить емкость на место, закрутив крышку с трубкой подачи раствора ДС;
- зафиксировать при помощи тормозов Аппарат внутри помещения так, что бы расстояние между Аппаратом и ближайшими предметами (стена, мебель и т.п.) было не менее 1 метра.
- подключить вилку шнура электропитания к сети;
- тумблер «СЕТЬ» установить в положение «Включено».
- отключить приточно-вытяжную вентиляцию и закрыть окна, форточки, двери.

2. Порядок действий при обработке.

- установить требуемое время распыления в минутах (в зависимости от объема помещения и режимов дезинфекции, см. Таблицу 1);
- нажатием на кнопку «ПУСК/СТОП» произвести запуск распыления (Аппарат включится с задержкой 10 сек., за это время Персонал **ОБЯЗАН** покинуть помещение);



Внимание! Экстренное прерывание режима обработки может быть произведено нажатием на кнопку «ПУСК / СТОП».

Время распыления (в мин.) и количество распыляемого ДС (в мл.) в зависимости от объема и норм расхода.

Таблица 1

Норма Расхода средства	Объем помещения м ³														
	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	240	300
3 мл/м³	3мин/ 180мл	4мин/ 210мл	4мин/ 210мл	5мин/ 270мл	5мин/ 300мл	6мин/ 330мл	6мин/ 360мл	7мин/ 390мл	7мин/ 420мл	8мин/ 450мл	9мин/ 480мл	9мин/ 510мл	9мин/ 630мл	12мин/ 720мл	16мин/ 900мл
6 мл/м³	6мин/ 360мл	6мин/ 420мл	6мин/ 420мл	9мин/ 540мл	10мин/ 600мл	11мин/ 660мл	12мин/ 720мл	14мин/ 810мл	14мин/ 840мл	15мин/ 900мл	16мин/ 960мл	17мин/ 1020мл	18мин/ 1080мл	24мин/ 1440мл	30мин/ 1800мл
9 мл/м³	9мин/ 540мл	11мин/ 630мл	12мин/ 720мл	14мин/ 810мл	15мин/ 900мл	17мин/ 990мл	21мин/ 1260мл	20мин/ 1170мл	21мин/ 1260мл	22мин/ 1350мл	24мин/ 1440мл	26мин/ 1530мл	27мин/ 1620мл	42мин/ 2520мл	44мин/ 2700мл
12 мл/м³	12мин/ 720мл	14мин/ 840мл	16мин/ 960мл	17мин/ 1080мл	20мин/ 1200мл	22мин/ 1320мл	24мин/ 1440мл	26мин/ 1560мл	28мин/ 1680мл	30мин/ 1800мл	32мин/ 1920мл	34мин/ 2040мл	36мин/ 2160мл	48мин/ 2880мл	60мин/ 3600мл

Пример расчета необходимого количества дезраствора (перекись водорода 6%) и времени распыления этого количества дезраствора Аппаратом (в режиме профилактической дезинфекции) для помещения объемом 60 м³:

1. Расчет необходимого количества дезраствора для заполнения ёмкости:

$$60 \text{ м}^3 \times 3 \text{ мл/м}^3 = 180 \text{ мл, где:}$$

60 м³ – объем обрабатываемого помещения;

3 мл/м³ – расход дезсредства, требуемое в соответствии режимами по применению Аппарата (см. Инструкцию по применению Аппарата);

180 мл – необходимое количество дезраствора для помещения объемом 60 м³.

2. Расчет времени распыления дезраствора Аппаратом, устанавливаемое на пульте управления:

$180 \text{ мл} \div 60 \text{ мл/мин} = 3 \text{ мин}$, где:

180 мл – необходимое количество дезраствора для помещения объемом 60м³;

60 мл/мин – производительность Аппарата;

3 мин – время распыления 180 мл дезраствора Аппаратом.

- разместить на двери помещения предупреждающую табличку «Не входите! Идет дезинфекция помещения!» или включить световое табло.
- аэрозольная дезинфекция помещений проводится в отсутствие людей, поэтому необходимо контролировать, чтобы во время распыления никто не входил в помещение;
- по окончании времени распыления Аппарат отключится автоматически и загорается индикатор «Дезинфекция проведена».
- по окончании обработки дождаться проветривания помещения (аэрации) естественным путем, для сокращения времени аэрации включить приточно-вытяжную вентиляцию.

Внимание! Входить в помещение после обработки можно только после окончания времени токсического действия препарата, указанного в инструкции на применяемое ДС (при необходимости, войти в помещение можно ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ).



Входить в помещение, после дезинфекции, при норме расхода- 3 мл/м³, 6% перекисью водорода можно:

- через 4 часа при однократном распылении и включённой приточно-вытяжной вентиляции.
- через 7 часов при двукратной проветривании естественным путём (аэрации) .

Внимание: по окончании обработки помещений промыть форсунку, емкость и трубки Аппарата дистиллированной водой:

- слить остатки ДС, (с использованием средств индивидуальной защиты), *в помещении, оборудованном приточно-вытяжной принудительной вентиляцией*;
- извлечь емкость для дезинфицирующего средства;
- открутить крышку и провести ополаскивание емкости водой;
- заполнить емкость дистиллированной водой в количестве 0,2 л.;
- закрутить крышку и присоединить трубку подачи раствора;
- поместить емкость на место;
- нажатием на кнопку «+» установить время распыления 5 минут;
- нажатием на кнопку «ПУСК / СТОП» произвести запуск распыления дистиллированной воды;
(после окончания распыления дистиллированной воды, компрессор продует воздухом все систему)
- слить остатки воды и просушить емкость;
- установить емкость на место, закрыв крышкой.

4. ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТА:

- тумблер «СЕТЬ» установить в положение «Выключено»;
- отключить вилку шнура сетевого питания от сети;



Внимание! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению средства. При обращении со средством необходимо надеть индивидуальные средства защиты (очки, респиратор с фильтрами по уровню безопасности Р-3, халат, перчатки и т.п.).