




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРОНТ - М»

ПАСПОРТ



Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий «КДС КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/06144.

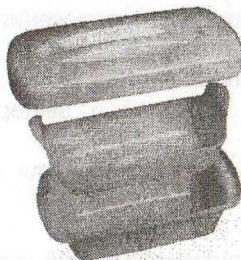

1. Основные параметры контейнеров и комплектность

Модель контейнера	Рабочий объем, л	Габаритные размеры не более, мм	Внутренние размеры перфорированного поддона, мм	Масса не более, кг	Температура, выдерживаемая контейнером, °С	Ванна	Перфорированный поддон	Утопитель	Крышка	Паспорт
КДС-0,1	0,1±0,05	Ø100xh54	Ø63xh40	0,08	+121	1	1	-	1	1
КДС-0,2 белый / прозрачный	0,2±0,05	Ø96xh72	Ø55xh52	0,08 / 0,11	+121	1	1	-	1	1
КДС-1	1±0,2	280x155x105	180x75x50	0,5	+121	1	1	1	1	1
КДС-3	3±0,4	370x185x120	240x110x90	0,8	+121	1	1	1	1	1
КДС-5	5±1,0	400x285x165	260x175x120	1,2	+121	1	1	1	1	1
КДС-10	10±1,6	450x325x205	290x200x160	2,0	+121	1	1	1	1	1
КДС-11	11±2,0	775x285x170	630x175x130	2,6	+121	1	1	-	1	1
КДС-20	20±4,0	760x460x190	600x270x150	5,5	+65	1	1	-	1	1
КДС-30	30±6,0	845x475x235	560x230x190	6,0	+65	1	1	-	1	1
КДС-35	35±7,0	880x475x240	680x320x190	6,5	+65	1	1	-	1	1
КДС-6	15±2,0	450x450x180	-	1,8	+65	1	-	-	1	1
КДС-6Л-1К	6±1,2	420x360x70	-	1,2	+65	1	-	-	1	1
КДС-6Л-2К	6±1,2	420x360x70	-	1,1	+65	1	-	-	1	1

Контейнеры КДС-30 и КДС-35 оснащаются боковым или нижним сливным устройством по заказу потребителя. Контейнеры с нижним сливным устройством рекомендуется устанавливать на тележку ТБ-01-«КРОНТ»-1 (по заказу).

Срок службы не менее 3 лет.

2. Подготовка и порядок работы

2.1. Провести распаковку составных частей контейнера, протереть детали контейнера моющим раствором, ополоснуть водой, высушить и провести обработку в соответствии с МУ №287-113.

2.2. Обработка инструментов и изделий медицинского назначения осуществляется в соответствии с МУ №287-113 дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ. Для проведения обработки изделий следует:

- поместить обрабатываемые изделия в перфорированный поддон (кроме КДС-6, КДС-6Л) и опустить в ванну;
- залить ванну раствором до полного погружения обрабатываемых изделий, добиться полного заполнения полостей раствором (для обеспечения полного погружения легких предметов использовать утопитель);
- закрыть ванну с поддоном крышкой и выдержать экспозицию согласно режиму обработки;
- извлечь поддон из ванны, установить его для стекания раствора согласно конструктивным возможностям модели.

2.3. По окончании работы проводится обработка составных частей контейнера в соответствии с МУ № 287-113 и инструкциями по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ.

3. Техника безопасности

К работе по дезинфекции и стерилизации допускаются лица, ознакомленные с действующими правилами техники безопасности при работе с конкретными дезинфицирующими средствами.

4. Свидетельство о приемке

Контейнер КДС-«КРОНТ» в исполнении _____ соответствует техническим условиям ТУ 9451-009-11769436-2001 и признан годным к эксплуатации.

Год изготовления _____

Дата продажи _____

Подпись _____

Штамп предприятия _____

Акционерное Общество
«КРОНТ-М» (АО «КРОНТ-М»)
141400 г. Химки Московской области
ул. Спартаковская д.9 пом.1
тел./факс: (495) 572-84-10

5. Утилизация

Утилизация контейнера после истечения срока службы должна проводиться в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

6. Условия транспортирования и хранения:

6.1. Температура от -50°C до +50°C.

6.2. Влажность 80 % при температуре +25°C.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

7.2. При обнаружении дефекта в гарантийный период дефектное изделие или его составная часть заменяются. Дефектное изделие, акт о наличии дефекта и заполненный гарантийный талон направляются на предприятие-изготовитель.

7.3. Претензии не принимаются: при наличии на изделии повреждений, полученных в результате нарушения режимов дезинфекции и стерилизации, применения изделия не по назначению.

Адрес предприятия – изготовителя АО «КРОНТ-М»

Россия, 141400, Московская область г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, пом.1

☎ (495) 500-48-84 (многоканальный),

✉ info@kront.com,

Internet: www.kront.com

Линия отрыва

Гарантийный талон

АО «КРОНТ-М» ✉ Россия, 141400, г. Химки МО, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1 ☎/факс (495) 500-48-84 572-84-10 (15, 20, 84) ✉ info@kront.com 🌐 www.kront.com	Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий «КДС-«КРОНТ» в исполнении _____	Дата продажи: _____ 04. 2016 г.	Подпись _____
Владелец и адрес владельца: _____	Характер дефекта: _____	Дата возникновения дефекта _____	Подпись _____
Акционерное Общество «КРОНТ-М» (АО «КРОНТ-М») 141400 г. Химки Московской области ул. Спартаковская д.9 пом.1 тел./факс: (495) 572-84-10		_____	_____
АО «КРОНТ-М»	Выполнена работа по устранению дефекта	Дата: _____	Подпись _____
_____	_____	_____	Штамп _____