

Найти и заказать набор "Имитаторы ранений и поражений"
можно на сайте medik-dom.ru

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

набор

«Имитаторы ранений и поражений»

ТУ 32.99.53-006-01899511-2020


(№ по каталогу М10)



ЗНАК ОТЛИЧИЯ ПРИСВОЕН ПО ИТОГАМ
КОНКУРСНОГО ВЫБОРА ЛУЧШИХ ОТЧЕСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ОСНАЩЕНИЯ
(УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ)
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2021 Г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор муляжей предназначен для демонстрации и самостоятельной работы учащихся при изучении курса «Человек и его здоровье» в темах «Опорно-двигательная система», «Кровь и кровообращение», «Кожа». Комплект может служить наглядным пособием в аналогичных темах углубленного курса биологии, во внеклассной работе при подготовке к экскурсиям, походам, жизни в спортивно-оздоровительных лагерях, а также предназначен для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи при ранениях различной степени тяжести, иммобилизации и транспортировке пострадавших на занятия по ГО.

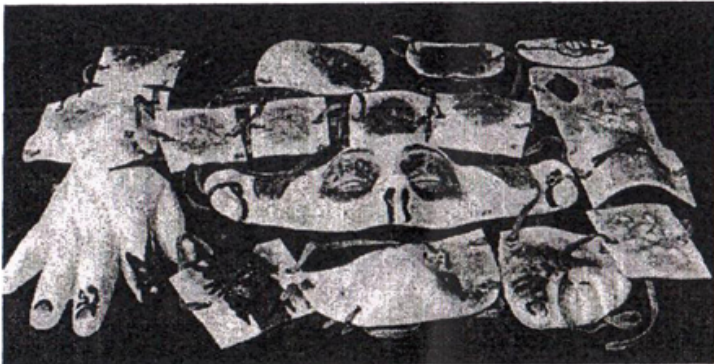

В набор входят 18 муляжей-имитаторов:

1. Открытый перелом плечевой кости
2. Открытый перелом бедра
3. Ожог кисти I-II-III степени
4. Отморожение кисти I-II степени
5. Открытый перелом предплечья
6. Закрытый перелом голени
7. Проникающие ранение брюшной полости с выпавшими петлями кишки
8. Рвано-ушибленная рана стопы

9. Открытый перелом нижней челюсти
10. Закрытый перелом предплечья
11. Закрытый перелом бедра
12. Проникающее ранение грудной клетки
13. Открытый перелом голени
14. Закрытый перелом плеча
15. Закрытый перелом ключицы
16. Открытый перелом ключицы
17. Перелом основания черепа
18. Открытый перелом пястных костей с частичной травматической ампутацией II фаланги

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Имитаторы представляют собой мягкие накладные, художественно расписанные пластинки, с вставленной тесьмой для демонстрационного крепления на теле человека или тренажера.

Имитаторы уложены в специальный кейс.

Предприятие оставляет за собой право, без уведомления потребителя, вносить незначительные изменения в конструкцию, комплектацию, технические характеристики, внешний вид, включая изменения по упаковке, не ухудшающие потребительских свойств изделия и его методического назначения.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- набор муляжей-имитаторов - 18 шт.;
- руководство по использованию, паспорт-1 шт.;
- кейс или коробка упаковочная – 1 шт.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации и транспортировке набор должен быть защищен от ударов, прямых солнечных лучей и храниться в сухих проветриваемых помещениях.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Проведены приемочные испытания согласно требованиям ТУ 32.99.53-006-01899511-2020. Набор «Имитаторы ранений и поражений» признан годным для эксплуатации.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работу моделей в течение 12 месяцев со дня реализации при правильной эксплуатации и хранении.