

Заказать штатив для вливаний Ортоника Basic 400
можно на сайте <https://medik-dom.ru/>



Стойка Basic 400



Паспорт изделия

1. Назначение

Стойка Basic 400 предназначена для удержания сосудов при длительных вливаниях одному или двум пациентам одновременно. Стойка позволяет размещать на определённой высоте флаконы или разовые системы с лекарственными растворами при проведении лечебных процедур.

2. Конструкция

Стойка представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих узлов: ножка левая, ножка правая, центральная опора, опора верхняя с фиксаторами, держатель флаконов. Держатель имеет два кольца диаметром 80 мм и 40 мм, два подвесных крючка.

3. Основные технические характеристики

Высота	1850 мм
Ширина	640 мм
Длина	500 мм
Диаметр малого кольца	40 мм
Диаметр большого кольца	80 мм
Вес стойки	2,1 кг
Вес сумки	0,35 кг

4. Комплект поставки

Стойка Basic 400 в составе:


- ножка левая - 1 шт.
- ножка правая - 1 шт.
- центральная опора - 1 шт.
- опора верхняя с фиксаторами - 1 шт.
- держатель флаконов - 1 шт.
- монтажный комплект - 1 шт.
- Паспорт изделия - 1 шт.

5. Меры предосторожности

- Убедитесь в надёжной фиксации крепления ножек к центральной опоре
- Убедитесь в срабатывании фиксаторов в момент сочленения деталей
- Не допускается эксплуатация стойки в разобранном состоянии
- Поверхность, на которой будет стоять стойка, должна быть ровной во избежание шатания (или падения) стойки
- Будьте осторожны с выпирающими частями стойки
- Максимальная нагрузка на выпирающие части стойки не более 1,5 кг
- Берегите конечности от защемления в процессе сборки конструкции
- Не допускайте контакта изделия с электрическими приборами и проводами.

6. Схема сборки

Левую и правую ножку закрепить к центральной опоре с помощью винтов и барашковых гаек входящих в комплект. Верхнюю опору установить в центральную опору и закрепить с помощью кнопочного фиксатора. Держатель для флаконов установить в центральную опору с помощью кнопочного фиксатора. Перед эксплуатацией убедитесь в надежности сборки. Стойку в разобранном состоянии рекомендуется переносить в чехле.

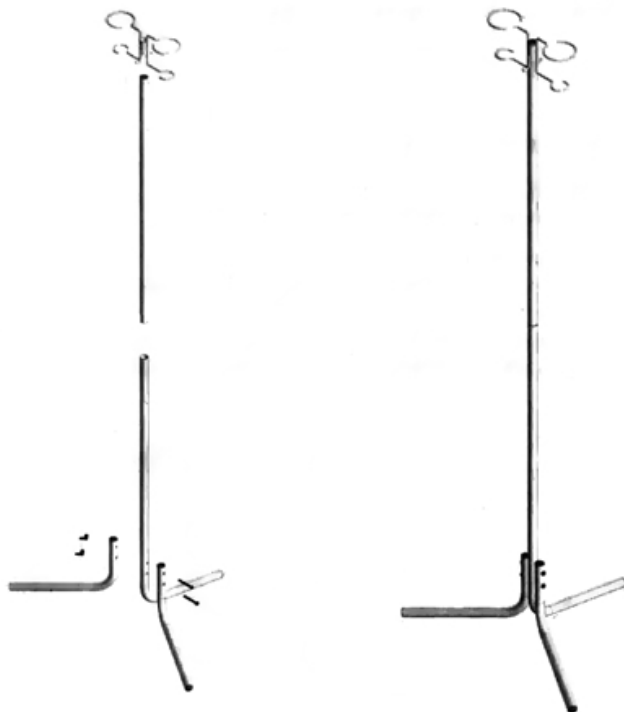

7. Уход и обслуживание

Необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо. Для чистки изделия можно воспользоваться любым чистящим средством на основе воды, за исключением средств имеющих абразивный принцип действия.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.