

УХОД И ГИГИЕНА

Пикфлоуметр необходимо очищать минимум 1 раз в неделю при помощи любой чистящей жидкости. Чтобы удалить загрязнения, прибор необходимо поместить в моющий раствор минимум на 30 минут, затем промыть прибор чистой водой. Также можно мыть пикфлоуметр в посудомоечной машине при температуре до +65°C.

УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО.

Для очистки пикфлоуметра можно использовать спиртовые салфетки, при этом особо тщательно нужно очищать мундштук. При явном загрязнении пикфлоуметр использовать нельзя.

Использование одним пациентом в домашних условиях:

Пикфлоуметр необходимо очищать минимум 1 раз в неделю.

Не использовать прибор дольше 3 лет!

Использование в клинике (требуется одноразовый мундштук с адаптером):

После каждого пациента необходимо очистить пикфлоуметр. Для каждого пациента нужно использовать новый одноразовый мундштук или бактериальный фильтр. Рекомендуется замена пикфлоуметра после одного года использования или после 350 пациентов.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора!

- Не пытайтесь разобрать прибор, это может привести к тому, что пикфлоуметр будет показывать неправильные результаты!
- Если пикфлоуметр был поврежден, его нужно заменить.
- Храните устройство в сухом и чистом месте.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Пикфлоуметр Vitalograph имеет гарантию один год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Точность: ± 10 L/min или $\pm 10\%$ показаний

Воспроизводимость: ± 10 L/min или $\pm 5\%$ показаний

Диапазон измерений: 50–800 L/min

Условия использования:

Температура воздуха 10–40°C

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Температура: 0–50°C

Относительная влажность воздуха: 10–95%

Vitalograph®
Your respiratory partner

Пикфлоуметр VITALOGRAPH с принадлежностями

Для наблюдения за функцией дыхания (пиковая скорость выдоха)

Артикул 031G3982

Рег.Уд. №ФСЗ 2008/02179



Vitalograph (Ireland) Ltd.,

Gort Road Business Park, Ennis, Clare, Ireland
e-mail: sales@vitalograph.ie

Тел: (065) 686 41 00

Купить пикфлоуметр можно
на сайте <https://medik-dom.ru>

Vitalograph®
Your respiratory partner

my PEF



ПИКФЛОУМЕТР

Прибор для индивидуальных ежедневных наблюдений за патологическими состояниями дыхательных путей

