

Инструкция по применению стерильных простыней с липким краем или хирургической пленкой для изоляции и защиты операционного поля.

1. Вскрытие стерильных пакетов и все действия с его содержимым производятся операционной бригадой в операционной, в стерильных халатах, стерильными руками и с помощью стерильных инструментов.
2. В области операционного поля необходимо обработать кожу спиртом или спиртовым раствором йода. В случае обработки операционного поля водным или другим не спиртовым раствором антисептиков, после этого **ОБЯЗАТЕЛЬНО** протереть кожу спиртом.
3. **ДОЖДАТЬСЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ! НЕ КЛЕИТЬ ОПЕРАЦИОННУЮ ПЛЕНКУ И ЛИПКИЕ КРАЯ ПРОСТЫНИ НА ВЛАЖНУЮ КОЖУ!**
4. Вскрыть индивидуальный пакет. Извлечь простыню в сложенном виде. Руководствуясь пиктограммой, расположить простыню НАД операционным полем защитным бумажным покрытием вниз. Затем отслоить защитное покрытие и приклеить пленку или липкий край на тело, после чего раскрыть простыню как книжку при необходимости продолжать отклеивать бумагу от липкого края и последовательно фиксировать простыню к телу пациенту. Хирургическую пленку разгладить мягкими движениями от центра к периферии. Расправить простыню на области ног, груди и головы пациента. Расправить карманы, отвод опустить в емкость для сбора жидкости.
5. Разрез в области операционного поля производить непосредственно по хирургической пленке, которая остается на коже до конца операции.
6. Перед наложением швов отслоить пленку на расстоянии 5 см вокруг раны. Наложить швы, после чего полностью удалить пленку.