

Гарантийный срок:

6 месяцев на сохранение медицинских свойств (гарантия отсчитывается с момента продажи изделия).

Гарантийными случаями не являются:

- ▶ механические повреждения (включая случайные)
- ▶ повреждения, вызванные использованием товара не по назначению
- ▶ дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием
- ▶ внесения любых изменений в конструкцию

Гарантия не распространяется на упаковку.

Дата производства изделия:

указана на этикетке в номере партии «LOT»: последние шесть цифр обозначают год и неделю производства.

Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации.

Соответствие стандартам:

Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ № РЗН 2013/928 от 07.12.2017 года.
Декларация о соответствии.

Расшифровка символов, применяемых на упаковке:



Знак соответствия. На продукцию оформлена декларация о соответствии



Обратитесь к инструкции по применению



Сертификация CE



Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами



Соответствие международным стандартам качества



Не содержит латекс



Соответствие стандарту безопасности в текстильном производстве



Производитель



Модель



Код партии

IM_JW127_RU_2_A6_5118

B. Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland

Производитель: **Би. Велл Свисс АГ**, Банхофштрассе 24, 9443 Виднау, Швейцария

Место производства: Да Ю Энтерпрайз Ко., Лтд., №123, Сингонг 3-й проезд, Тяньхун Индустриал Парк, район Тяньхун, округ Чжанхуа, 52046, Тайвань, Китайская Республика. Сделано в Тайване.

B. Well
rehab

www.bwell-swiss.ru



Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B. Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B. Well.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

B. Well
rehab

Изделия медицинские компрессионные:

Гольфы JW-127

Серия MED: современный метод лечения отеков

Компрессионные гольфы B. Well rehab серии MED предназначены для улучшения венозного оттока при заболеваниях вен у мужчин. Механизм действия компрессионного трикотажа основан на принципе распределенного давления: максимальное давление в области щиколотки (лодыжки) 22-32 мм.рт.ст. уменьшается в области голени, в подколенной области давление минимально.

Благодаря воздействию трикотажа на поверхностные вены:

- ▶ улучшается работа венозных клапанов
- ▶ перераспределяется кровоток в глубокие вены
- ▶ улучшается отток крови снизу-вверх
- ▶ уменьшаются отеки и ощущение тяжести в ногах

Все изделия проходят проверку на медицинскую эффективность согласно Британскому стандарту BS 6612.

Особенности:

- ▶ нити класса «А» с двойной S-образной оплеткой обеспечивают изделиям необходимый компрессионный эффект
- ▶ эргономическая форма изделия позволяет легко надевать гольфы и удерживает их правильную посадку по ноге в течение всего дня
- ▶ вязка «сотами» с дополнительной нитью помогает поддерживать форму гольфов после стирки, обеспечивает естественный влаго-воздухообмен, сохраняет ноги сухими
- ▶ усиленная стопа с зонами вязки разной плотности защищает ногу от трения по время движения, препятствует износу, повышает прочность и долговечность изделия
- ▶ мягкая двойная резинка прочно фиксирует гольфы на ногах во время активных движений, сохраняет нормальное кровообращение, создает ощущение комфорта

Показания (II class - 22-32 мм рт. ст.):

- ▶ хроническая венозная недостаточность
- ▶ состояние после склеротерапии и оперативных вмешательств
- ▶ выраженные отеки ног
- ▶ расширенные поверхностные вены и множественные сосудистые звездочки
- ▶ профилактика тромбоза глубоких вен
- ▶ посттромбофлебитическая болезнь

Противопоказания:

- ▶ септическое заболевание вен и мягких тканей
- ▶ сердечно-легочная недостаточность
- ▶ трофические язвы нижних конечностей

⚠ Предупреждения

Перед покупкой компрессионного трикотажа II класса рекомендуется консультация врача.

Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть аллергическая предрасположенность к компонентам, входящим в состав материала.

Порядок надевания:

Рекомендуется надевать компрессионный трикотаж утром до появления отеков.

Прежде чем приступить к надеванию изделия, проверьте, чтобы на руках были аккуратно подстриженные ногти, отсутствовали заусенцы.

1. Соберите изделие до пятки. Аккуратно натяните на ступню. Проверьте правильность расположения всей стопы.
2. Постепенно надевайте трикотажное изделие на голень. Не следует тянуть гольфы с усилием за верхний край



3. Окончательно расправьте складки по всей длине изделия

Режим ношения:

Для профилактики отеков следует носить компрессионный трикотаж в течение дня, если иное не рекомендовано врачом.

Если Вы снимаете изделие в течение дня, рекомендуется надевать его снова после 10-15 минутного отдыха ног в приподнятом положении.

Комплектность:

- ▶ гольфы – 1 пара в упаковке, инструкция

Правила подбора:

Мужские гольфы B.Well rehab можно подобрать по длине ступни.

Размер изделия наносится на внутреннюю сторону резинки.


Компрессионный трикотаж B.Well rehab также можно подобрать, используя таблицу, основанную на индивидуальных измерениях.

Таблица подбора размеров

Размер	Размер обуви	Длина ступни
2	39-41	26-27,5 см
3	41-43	27,5-29 см
4	43-45	29-31 см
5	от 45	от 31 см

Таблица измерений для подбора мужских гольфов

Измерение: сантиметры	Длина ступни	Окружность лодыжки	Окружность икры	Длина от пятки до окружности d
РАЗМЕР	a	b	c	A-D
2	26-27,5	до 22	до 35	до 39
3	27,5-29	22-25	35-39	до 42
4	29-31	25-28	37-41	до 44
5	от 31	от 28	41-47	до 46

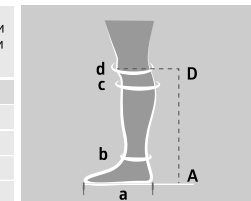

Состав:

Наименование изделия	Класс компрессии	Состав
Изделия медицинские компрессионные: Гольфы JW-127	II class, 22-32 мм рт. ст.	74% Полиамид 26% Эластан (Лайкра)

Правила ухода:

- 👉 Стирайте компрессионные изделия только вручную
- 📄 Температура стирки не должна превышать 30°C
- ✖ Нельзя использовать отбеливатели, химически активные добавки
- ✖ Запрещается гладить изделия
- ✖ Сушите компрессионные изделия в прохладном месте, избегая нагревательных приборов

Для сохранения медицинских свойств и удаления загрязнений рекомендуется ежедневная стирка.

Для стирки рекомендуется использовать жидкое, нейтральное моющее средство.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.